

Normatiiviset vaatimukset

EU -asetus 2016/425

vaatimukset henkilönsuojaimen suunnittelulle ja valmistukselle;

UNI EN 166: 2004 - Henkilönsuojaimet

Tekniset tiedot, CE 765/2008 - Graafiset merkit - Värit ja turvamerkit
Rekisteröidyt turvamerkit.



Käyttöohjeet

HUOMIO: käytä henkilönsuojaimia ennen kuin altistat itsesi riskille

Merkintä:

Merkki objektiivissa: L 1 S CE - 1 (OPTICAL CLASS), S (LISÄVOIMA)

Merkintä runkoon: L EN 166 3 S CE - S (LISÄVOIMA)
EN 166 (VOIMASSA OLAVA ASETUS)



Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)

Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it



FI

R5 VISIIRI OHJEET

Kasvosuoja on luokiteltu luokan II henkilönsuojaimeksi, ja sen avulla voit suojata kasvosi roiskeilta, vesipisaroilta ja syljeltä sekä vähentää tartuntariskiä.

Kasvouojassa olevan vahtomuovikappaleen ansiosta erittäin mukava ja kevyt päällä. Paino vain noin 40 grammaa. Kasvosuojaa voidaan käyttää yhdessä silmälasien kanssa.

Polykarbonaattisuoja, täysin läpinäkyvä, vaihdettavissa nopeasti ja helposti.



Larident Srl

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova)







Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it

R5 VISIIRI

ASENNUSOHJEET

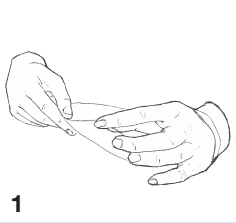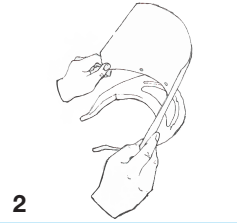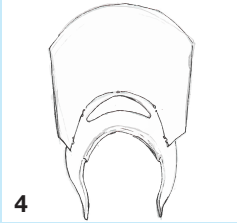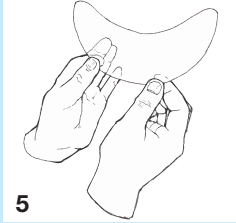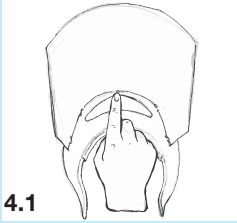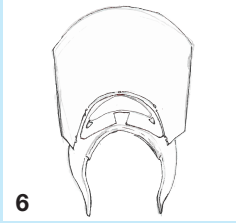

			
1 Käännä kehystä niin, että tapit ja ohjaimet ovat käyttäjän kasvoja kohti	2 Ota visiiristä kiinni taivuttamalla sitä hieman. Aloita keskeltä ja aseta kalvo ensin korkeimpaan ohjaimeen ja liu'uta se sitten alimpaan; työnnä tämän toimenpiteen jälkeen keskimmäistä reikää (vaakasuorassa) niin, että kasvosuojain alkaa saada pyöreän muodon	4 Aseta visiiri kahteen viimeiseen ohjaimeen ja työnnä reikä sitten tappiin (vaakasuoraan)	5 Käytä tarvittaessa pientä suojakalvoa peittämään tuuletusaukko (lisäsuoja)
	3 Liikuta visiiriä liu'uttamalla uloimmat ohjaimet sisään ja työnnä sitten reikä sormien avulla tappiin (vaakasuoraan)	4.1 	6 
		7 	7 Visiiri on valmis

HUOMIO: SUOJAA VAIN VESISPRAYLTA

Kalvo ja visiiri voidaan puhdistaa alkoholittomalla desinfiointiaineella

R5 VISIIRI

KUVAUS



Varoitukset

visiirien valmistuksessa käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa allergioita erittäin herkälle iholle, ole varovainen ja käsittele niitä varoen.

Huolto

älä käytä alkoholiliuoksia, ne voivat aiheuttaa naarmuja tai sumentumista visiirissä ja suojalaseissa. Jos visiiri on naarmuuntunut tai samea, se on vaihdettava uuteen.

PUHDISTUS

Käytä suojakalvon ja kehyksen puhdistamiseen alkoholittomia desinfiointiaineita, jotka ovat saippua- tai pesuainepohjaisia. Poista pesun jälkeen kaikki pesuainejäämät juoksevan veden alla.

KÄYTTÖMENETELMÄ

- Käytä kasvonsuojana, joka suojaa sylkipisaroilta ja vesipisaroilta.
- Käytä sisällä ja ulkona, kun ympäristön lämpötila on alle 50 ° C ja max -10°C
- Vain yhden henkilön käytettäväksi
- Voidaan käyttää yhdessä muiden henkilönsuojainten, kuten FFP-maskin tai silmälasien kanssa.

KÄYTTÖ: KÄYTTÖOHJEET

Käytä henkilönsuojainta kuten kypärää kiristämällä kuminauha pään koon mukaan. Käytön jälkeen tarkista, että suojaviisiiri peittää kasvojen oikean ja vasemman puolen, otsan ja leuan. Näiden vaiheiden tarkistamisen jälkeen voit olla varma, että olet käyttänyt R5 -visiiriä oikein.

SUOSITUKSET

- Tarkasta henkilönsuojain huolellisesti ennen jokaista käyttöä äläkä käytä sitä, jos jossakin osassa on merkkejä kulumisesta tai toimintahäiriöstä.
- Älä sormeile henkilönsuojaimia.
- Noudata edellisessä kappaleessa annettuja asennusohjeita.
- Jos kasvosuoja on vaurioitunut tai naarmuuntunut, se on aina poistettava käytöstä ja vaihdettava.