

Ohjeet

TERÄPULLON OSAT

INDIKAATTORI:
NÄYTTÄÄ, MIHIN SUUNTAAN
TERÄVÄN PUOLEN TULISI
KOHDATA.


TÄTÄ SKALPELIN KAHVAN
PUOLTA KUTSUTAAN
MUNAksi.




KIINNITYS SEINÄÄN TAI TYÖTASOON

1. Jos et ole asentanut BladeFLASKia, valmistele kiinnityskiinnike.*

A FKIINNITTIMEN ALAPUOLELLA ON KAKSI PUOLINEN TEIPPI

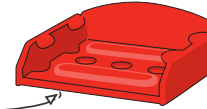

B TAI KÄYTÄ RUUVEJA
* KATSO ASENNUSSOHJEET
KIINNITYSPAKKAUKSESTA

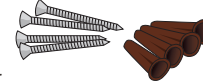

2. BladeFLASK voidaan asentaa seinään tai pöytälevyyn.



LIU'UTA ALAS
TELINEESEEN




LIU'UTA
TELINEESEEN


HUOMAUTUKSIA:
BLADEFLASK ON
KIINNITETTÄVÄ
KIINNITYSKIINNIKKEeseen
KÄYTÖN AJAKSI.

LEHTIEN POISTOYHDEN KÄDEN TEKNIikka

1. Aseta terä laskeutumisalustalle terävä puoli oikealle. (munan pitäisi olla oikeassa)

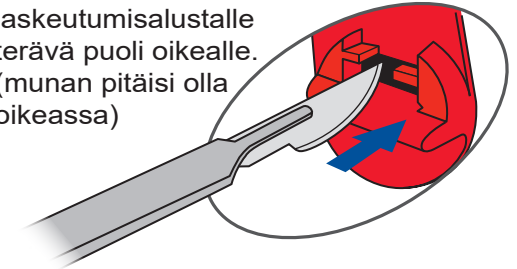


2. Liu'uta kuoren kahva sisään BladeFLASK kunnes kuuluu yksi naksahdus

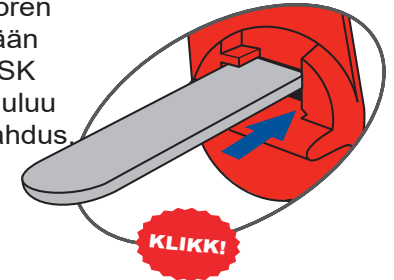

KLIIKKI!

3. Irrota kahva.

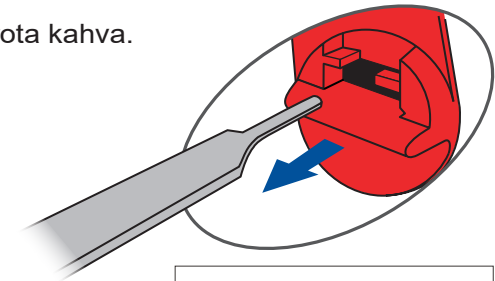

HUOMAUTUKSIA:
BladeFLASK käsitellään lääketieteellisenä jätteenä, kun siihen on asetettu 100 lehteä.