



UltraSeal XT™ hydro™

HYDROFIILINEN UURRE- JA FISSUURAPINNOITE



UltraSeal XT™ hydro™
Inspiral™ Brush -kärki


- Hydrofiilinen ennen kovetusta, hydrofobinen kovetuksen jälkeen sekä itsekiinnittyvä
- Edistysellinen sidosteknologia
- Fluoresointi mustavalossa auttaa varmistamaan, että pinnoite on yhä paikallaan
- Filleripitoinen resiini (53%)
- Tiksotrooppinen / ihanteellinen viskositeetti
- Kaksi sävyä: Opaque White ja Natural

UltraSeal XT hydro hydrofiilinen uurre- ja fissuurapinnoite on valokoveteinen, radiopaakki, fluoridia vapauttava yhdistelmämuovipinnoite. Se on vahvempi ja kulutuskestävämpi, sillä se sisältää 53 % resiiniä, ja sen kovetumiskutistuminen on vähäisempää kuin kilpailevien tuotteiden. Kärjen spiraaliharjan toiminta saa aikaan tiksotrooppisen UltraSeal XT hydro -pinnoitteen ohenemisen. Resiini jähmettyy, kun pinnoitteen oheneminen päättyy ja applikointi on valmis, mikä estää resiinin valumisen ennen valokovettamista. Pitkälle kehitetty hydrofiilinen kemia toimii kaiken näkyvän kosteuden poistamisen jälkeen. UltraSeal XT hydro -pinnoite sietää paremmin syvällä uurteissa ja fissuuroissa olevaa kosteutta.


Käyttö




1. Etsää ja huuhtelee.

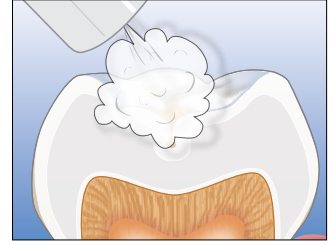

2. Poista hampaan pintaan jäänyt vesi kuivaamalla hammasta kevyesti ilmapuustilalla. Älä kuivaa hammasta liikaa.

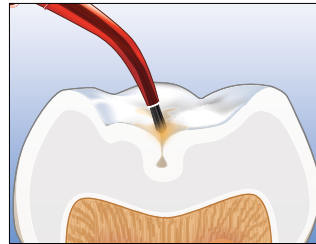

3. Annostele UltraSeal XT hydro -pinnoite.

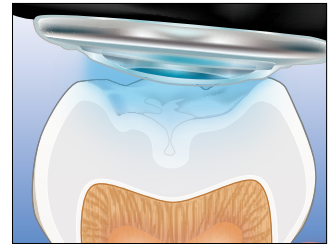

4. Valokoveta 3 sekuntia VALO™ LED-valokovettajan Xtra Power -tilalla.

Reunojen retentio ja mikrovuodot*

UltraSeal XT hydro -pinnoite



Ei mikrovuotoa.



Suojatut reunat.

Kilpaileva hydrofiilinen pinnoite



Mikrovuoto.



Irtoaminen reunoilta.

*Tiedot arkistossa. 1. realityesthetics.com



Ennen ja jälkeen


Rafael Bealchi



Ennen.



Jälkeen.

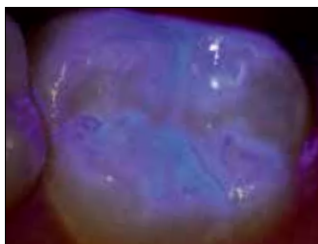

Reunojen ja retention tarkastaminen on usein vaikeaa pinnoitteen annostelun jälkeen. UltraSeal XT™ hydro -pinnoitteen fluoresenssiominaisuudet ovat ratkaisu tähän ongelmaan. Fluoresenssiominaisuuden ansiosta hampaan pinnoitteen tiiviyyden voi tarkastaa mustavalolla annostelun aikana ja seuraavilla käynneillä.

3532 UltraSeal XT Hydro Opaque White -pakkaus

3533 UltraSeal XT Hydro Natural -pakkaus

1 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro -ruisku

1 kpl 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch -ruisku

20 kpl Blue Micro -kärkiä

20 kpl Inspiral Brush -kärkiä



3534 UltraSeal XT Hydro Opaque White -täyttöpakkaus

3535 UltraSeal XT Hydro Natural -täyttöpakkaus

4 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro -ruiskuja




3536 UltraSeal XT Hydro Opaque White
-säästötäyttöpakkaus

20 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro -ruiskuja



35551 UltraSeal XT hydro Black Light -avaimenperä

1 kpl Black light -avaimenperä

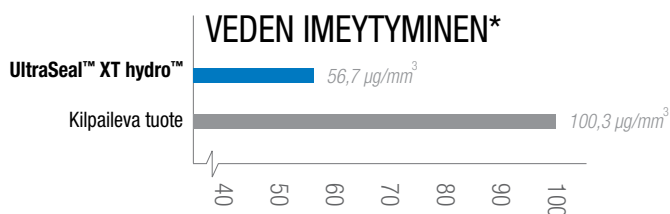

Tasapainoinen veden imeytyminen mahdollistaa paremman siedon kosteissa ympäristöissä ilman hajoamista.



Ei hajoamista tasapainoisen veden imeytymisen ansiosta.

*Tiedot arkistossa.