

# CLEARFIL™ SE Protect

DENTAL BONDING AGENT



## SUOMI KÄYTTÖOHJEET

### I. JOHDANTO

CLEARFIL SE Protect on valkokovetteinen sidosvalmiste, joka koostuu antibakteerisesta, itse-etsaavasta esikäsitteilyaineesta ja sidoseesta, josta vapautuu fluori. Esikäsitteilyaine hoitaa samanaikaisesti sekä dentiiniä että kileillettä.

### II. INDIAKATIOT

CLEARFIL SE Protect on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:  
[1] Välttämönläistemäuvia tai kompooneita.  
[2] Kaviteetin tiivistykseen välttämisen restauraatioiden esihoidossa.  
[3] Viuhion ja/tai paljaiden hammaskalvon hoitoon.  
[4] Lohjeneiden posilistona, yhdistelmäkeräämäistä tai valkokovetteesta yhdistelmämuovista valmistettujen kruunujen/siltojen intraoraaliseen korjaamiseen.  
[5] Posilistona, yhdistelmäkeräämäistä tai koveteesta yhdistelmämuovista valmistettujen proteettiisten rakenneiden pinnan käsitteilyyn.  
[6] Pilareille, joissa käytetään valo- ja taksokovetteista yhdistelmämuovia.  
[7] Kaviteetin tiivistykseen amalgamairestauraatioiden alle.

### III. KONTRAINDIKATIOT

Potilaat, jotka ovat yliherkkä metakryylihapon monomeereille

### IV. MAHDOLLISET SUIVUAKUTUKSET

Suun ilmankalot voivat vaalentua, jos ne joutuvat kosketukseen PRIMER- esikäsitteilyaineen kanssa proteiniin hyttymisen seurauksena. Tämä on kuitenkin väilläistä, ja vaalentumat kavata yleensä muutamassa päivässä.

### V. YHTEENSOPIAMATTOMUUS

[1] Älä käytä engonilia sisältävää materiaaleja puljan suojaista tai välttämistä varten, sillä engonili voi hidastaa yhdistelmämuovun kovettumisen.

[2] Rautaydintesiitit sisältävät hermostaattisia ainetta ei saa käyttää, sillä tällaiset aineet voivat aiheuttaa myös hammarsrajan tai ympärivän ilanlevulle väliräjäytymistä.

### VI. VAROTOIMINEPITEET

#### 1. Turvallisuus

Älä käytä tuotetta potilaalla, joka ovat yliherkkä metakryylihapon monomeereille.

2. Mikäli potilaalla ilmenee yliherkkyyttä, esimerkiksi ihotulehdusken oireita, tuottoen käytön ja keskeytävän ja potilaan on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

3. Tuottaneen käytön on noudattettava varovaluisuutta, jotta sitä ei joudu iholle tai silmin. Ennen käytöä potilaan silmät on suojaettava mahdollisista roiskeilta peitetillä.

4. Mikäli tuoteta pääsee ihokodokseelle, toimi seuraavasti:

<Mikäli tuoteta joutuu silmiin>

Silmä on huolehdittava välttämästä runsaalla vedellä ja potilaan on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

<Mikäli tuoteta joutuu iholle tai suun limakkalvoon>

Tuo tuotan välttämästi pyyhittää pois alkoholin kustellusta vanutupolla tai harsolla ja huolehdittava runsaalla vedellä.

5. Tuotteta käytetessä on noudattettava varovaluisuutta tuoteen mahdollisien nielumiinien välttämiseksi.

6. Välttää katsoamista suoraan kovetusvalon tuoteen kovetukseen aikana.

7. Säilytää tuotteen ulottumattomissa.

8. Saman käytäntöllä hoitaa ei saa käyttää useammalla potilaalla mahdollisien tarjuntojen välttämiseksi. Harjankäri on hävitettävä käytön jälkeen ja harjan varsi on steriloitava jokaisen potilaan jälkeen.

#### 2. Varotoimenpiteet käsitteilyn yhteydessä

1. PRIMER ja BOND muuttuvat geeliäiseksi, mikäli se altistetaan leikkauvalaisimien valolle tai luonolliselle valolle (ikkuunoiden läpi tuleva auringonvalo). Käytä suojailevää suojaataksesi ainetta aurinkoon.

2. Valkokovetteen emissiomerkki tulisi pitää mahdollisimman vertaileeksi ja lähellä muovipinta.

Mikäli valkokovettavaa muovipinta on suuri, on siihen sijoitettava jakaan alueita osiin ja valkokovetta jokainen alue yksittellen.

3. Alhainen valon voimakkuus johtaa huonon kiinnitymisen. Tarkista lampun käytäntö ja varmistă, ettei valkokovetimen kärjessä ole epäpuhtauksia. Kovetusvalon voimakkuus on suositeltavaa tarkistaa tarkoituksenmukaisella mittauslaitteella sopivina sivakävillein.

4. Tuotteta saatava käytettävä ainoastaan toimiluvan omaavat hammasläsketieteen ammatilaiset.

#### 3. Varotoimenpiteet varastoinnin aikana

1. Jos neste ei valu kunnolla koska tuoteta ei ole käytetty pitkään aikaan, ravistele astian ennen käytöä.

2. Älä käytä tuotetta viimeisen käytönpäivän jälkeen. Viimeinen käytönpäivä on merkityksessä.

3. CLEARFIL SE Protect on säilytettävä jääkaapissa (2-8°C/36-46°F), kun sitä ei käytetä. Jääkaapista poistamisen jälkeen aineen on annettava lämmetä huoneen lämpötilaan ennen käytöä. Mikäli näin ei tehdä, nesteeesteen voi muodostua kapatuksi käytön aikana tai se voi liukua käytön jälkeen.

4. Suojaa tuotetta lämpötiloilla tai survaria auringonvalolta.

5. Korkki on suljeettava lämpötilästä resiinin annostelun jälkeen.

6. Säilytä tuote asianmukaisessa paikassa, jonka on pääsy vain hammasläsketieteen ammatilaisilta.

#### 4. KOMPONENTTIT

Sisältö ja määrä on merkity kaukkaaseen.

##### 1. PRIMER\*1, (antibakteerinen, itse-etsava esikäsitteilyaine)

Pääaineosat:

- 10-metakryyloxydecoyl-dihydrogenofosfaatti (MDP)

- 12-metakryyloxydecoyl-pyrinumbromidi (MDPB)\*2, 3

- antibakteerinen monomeeri

- 2-Hydrosykiyimetatrylaatti (HEMA)

- Hydrofilinen dimetakrylaatti

- Vesi

[HUOMAUTUS]

\*1 Antibakteerinen PRIMER-esikäsitteilyaine suojaa S. Mutans -bakteereita.

\*2 Tämä monomeeri muodostaa resiniinatriisin polymeeraatioissa muiden monomeerien kanssa. Siinä on kvaternäärinen ammoniumsulfonyhmida, ja se on antibakteerinen monomeeria.

\*3 PRIMER-esikäsitteilyaine ja MDPB-monomeerien antibakteerinen vaikutus on osoitettu in-vitro-testeissä.

2. BOND (fluori sisältävä sidosaine)

Pääaineosat:

- 10-metakryyloxydecoyl-dihydrogenofosfaatti (MDP)

- Diethoxy-10-glycidylemetakrylaatti (Bis-GMA)

- 2-Hydrosykiyimetatrylaatti (HEMA)

- Hydrofilinen dimetakrylaatti

- di-Camphorquinone

- N,N-diethanol-p-toluidin

- Silanoli kolloidinen silika

- Pintakäsitteily natriumfluori

3. Lisätarvikkeet:

- Disposal brush tips (Kertakäytöisä harjan pääitä)

- Brush tip handles (Harjan päänsä)

- Mixing dish (Sekoitusasti)

- Light blocking plate (Valon pysäytävä levy)

- Outer case (Ulkopäällyys)

[HUOMAUTUS]

\* PRIMER- ja BOND-aineet voidaan annostella helposti ulkopäällyksen avulla.

\* PRIMER ja BOND on säilytettävä jääkaapissa, kun mitä ei käytetä.

VIII. KLIINISET TOIMINEPITEET

A. Välttämönläistemäuvia, kaviteetin tiivistys ja viuhlojen hampaiden tai paljaiden hammaskalvojen hoito käytäntöllä valokovetteesta (tai kompooneita)

A-1. Hammaskeranteen pudostus

Asianomaisella tavalla puhdistettu kaviteetti tarjoaa parhaimpan kiinnityshoton. Varmista, että kaviteetti on puhdistettu asianmukaisesti.

## [VAROITUS]

BOND-sidoseine muuttuu geeliäiseksi, mikäli se altistetaan leikkauvalaisimien valolle tai luonolliselle valolle (ikkuunoiden läpi tuleva auringonvalo). Käytä suojailevää suojaataksi ainetta aurinkoon tai leikkauvalaisimien valotta, ja käytä aine 3 minuutin kulussa annostelusta.

2. Levitä BOND-sidosainetta koko kaviteetin pinnalle kertakäytöisellä harjalla. BOND-sidoseine muuttuu sitä kevyestä öljyttömällä ilmalla lasaisena kevakalvon muodostamiseksi.

3. Valokoveta BOND-sidosainetta valokovetimella 10 sekunnin ajan (valon aallonpituuus: 400- 515nm).

## [B-6. Valkokovetteen yhdistelmämuovityölätytä

Vie yhdistelmämuovi (esim. CLEARFIL MAJESTY ES-2) kaviteettiin, valokoveta, viimeistele ja killota valmistajan käytöönhoidojen mukaan.

## [C-1. Sidospannan hoppoitus

Mikäli resini voi levitä leikkauvaltaan, jälkeen puistaa sitä kevyestä öljyttömällä ilmalla lasaisena kevakalvon muodostamiseksi.

## [D-1. Sidosaineen hoppoitus

Esteettinen materiaaleista (posilistona, yhdistelmäkeräämäistä, yhdistelmämuovista) valistettuun proteettiin rakenteiden siloini voivat suorittaa käytöönhöllä PRIMER-esikäsitteilyaineita ja CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR -aktivatioria.

## [E-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [F-1. Sidospannan hoppoitus

Peitä metallipala opaakilla resiinillä, kuten CLEARFIL ST OPAQUER -aineella.

## [G-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [H-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [I-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [J-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [K-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [L-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [M-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [N-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [O-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [P-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [Q-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [R-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [S-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [T-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [U-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [V-1. Sidospannan hoppoitus

Levitä sidospanna kaviteetti sen jälkeen normaaliin tapaan. [HUOMAUTUS]

## [W

## PORUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### I. INTRODUÇÃO

CLEARFIL SE Protect é um sistema de adesão fotopolimerizável, que consiste num primer anti-bacteriano auto-caterizante e num agente de adesão hidrofílico. O primer trata simultaneamente a dentina e o esmalte.

### II. INDICAÇÕES

- CLEARFIL SE Protect está indicado para as seguintes utilizações:
  - [1] Restaurações directas, utilizando um compómero ou resina composta fotopolimerizável.
  - [2] Obturação de cavidades, como pré-tratamento de restaurações indirectas.
  - [3] Tratamento de superfícies hipersensíveis e/ou superfícies radiculares expostas.
  - [4] Reparações intraorais de coroas/pontes fracturadas feitas em porcelana, cerâmica híbrida ou resina composta, utilizando resina composta fotopolimerizável.
  - [5] Tratamento de superfícies de próteses feitas em porcelana, cerâmica híbrida e resina composta fotopolimerizada.
  - [6] Construção de núcleos, utilizando resina composta fotopolimerizável ou de dupla polimerização.
  - [7] Obturação de cavidades sob restaurações de amalgama.

### III. CONTRA-INDICAÇÕES

Pacientes com hipersensibilidade a monômeros de metacrilatos

### IV. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

A mucosa oral poderá ficar esbranquiçada quando em contacto com o PRIMER, devido à coagulação proteica. Este efeito é temporário e desaparecerá após alguns dias.

### V. INCOMPATIBILIDADES

- [1] Não utilizar materiais que contenham eugenol para protecção da polpa ou para obturação provisória, pois o eugenol poderá retardar o processo de endurecimento do sistema de adesão.
- [2] Não utilizar agentes hemostáticos contendo compostos ferrosos, pois estes materiais poderão prejudicar a adesão e os iões férnicos residuais poderão provocar uma descoloração da camada ou da gengiva adjacente.
- VI. PRECAUÇÕES**
- 1. Precauções de segurança**

  - 1. Evitar utilizar o produto em pacientes com hipersensibilidade a monômeros metacrilatos.
  - 2. Caso ocorra uma reacção de hipersensibilidade como, por exemplo, dermatite, interromper imediatamente a utilização do produto e consultar um médico.
  - 3. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma toalha, a fim de proteger os mesmos de eventuals sapicões de material.
  - 4. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do seguinte modo:
    - Se o produto entrar em contacto com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água abundante e consultar um médico.
    - Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral: Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de algodão embebida em álcool e lavar com água abundante.
  - 5. Proceder com precaução, a fim de evitar que o paciente engula accidentalmente o produto.
  - 6. Evitar olhar directamente para a luz de polimerização quando for realizado o processo de polimerização.
  - 7. Manter o produto fora do alcance das crianças.
  - 8. Evitar utilizar a mesma escova de pincel descartável para diferentes pacientes, a fim de prevenir infecção cruzada. Descartar a escova após a utilização e esterilizar a cabaça do pincel.

- 2. Precauções de manuseamento e manipulação**

  - 1. O PRIMER e BOND adquirem uma consistência de gel quando expostos a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.
  - 2. A polpa deve ser protegida de luz solar. A polpa deverá ser mantida o mais profunda e mais verticalmente possível no contacto à superfície de resina. Se for necessária a polimerização de uma superfície de resina ampla, é aconselhável dividir a área em diferentes secções e efectuar a fotopolimerização de cada secção separadamente.
  - 3. Uma intensidade de luz fraca tem como consequência uma adesão fraca. Verificar o tempo de vida útil da lâmpada e se poderá existir uma eventual contaminação da ponta emissora de luz. É aconselhável verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela lâmpada de fotopolimerização, utilizando um dispositivo de avaliação adequado para o efeito.
  - 4. A utilização do produto é autorizada apenas a médicos dentistas.

- 3. Precauções de armazenamento**

  - 1. Caso o líquido não fluja facilmente do bocal, dado que não foi utilizado durante um período de tempo prolongado, agitar o recipiente antes de utilizar.
  - 2. Não utilizar o produto após expirada a data de validade. Ter em atenção a data de validade indicada no exterior da embalagem.
  - 3. O produto CLEARFIL SE Protect deverá ser refrigerado (2-8 °C / 36-46 °F) enquanto não estiver a uso, e antes de ser utilizado deverá ser mantido à temperatura ambiente até atingir a mesma. Após retirado do frigorífico é imprescindível aguardar que o produto atinja a temperatura ambiente, pois caso contrário o líquido poderá perder parte do seu efeito.
  - 4. Manter afastado de fontes de calor extremo ou radiação solar direta.
  - 5. Substituir a tampa do frasco logo que possível após a resina ter sido retirada do frasco.
  - 6. O produto deverá ser armazenado num local adequado e acessível apenas a dentistas.

### A. Precauções de armazenamento

- 1) PRIMER - 3 (primer auto-caterizante anti-bacteriano)
  - Principais componentes:
    - 10-Metacriloloxidil hidrogeno fosfato (MDP)
    - 12-Metacriloloxidil oxido-decloropiridinum brometo (MDPB)\*2, 3 -monômero anti-bacteriano\*
    - Metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA)
    - Dimetacrilato hidrofílico
    - Água
- [NOTA]
  - \*1 Este PRIMER tem uma propriedade anti-bacteriana contra *S. mutans*.
  - \*2 Este monômero faz uma matriz de resina após co-polimerização com outros monômeros. Tem o grupo sal de amônio quaternário e evidencia as propriedades anti-bacterianas num estado monômero.
  - \*3 Estas propriedades anti-bacterianas do PRIMER e MDPB foram avaliadas através de testes in-vitro.
- 2) BOND (agente de adesão hidrofílico)
  - Principais componentes:
    - 10-Metacriloloxidil hidrogeno fosfato (MDP)
    - Bisfenol A diglicidil metacrilato (Bis-GMA)
    - Metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA)
    - Dimetacrilato hidrofílico
    - di-Camforquinona
    - N,N-diethanol-p-toluidina
    - Silica coloidal silanizada
    - Fluoreto de sódio de superfície tratada
- 3) Acessórios
  - Disposable brush tips (Pontas de pincéis descartáveis)
  - Brush tip handles (Cabos de pincéis)
  - Mixing dish (Prato de mistura)
  - Light blocking plate (Placa de bloqueio de luz)
  - Outer case (Cápsula exterior)
- [NOTA]
  - \* O PRIMER e BOND podem ser facilmente distribuídos utilizando o recipiente da cápsula exterior.
  - \* O PRIMER e BOND deverão ser refrigerados enquanto não estiverem a uso.

### VIII. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

#### A. Restaurações directas, obturação de cavidades e tratamento de dentes hipersensíveis ou de superfícies radiculares expostas, utilizando uma resina composta (ou compómero) fotopolimerizável

##### A-1. Limpeza da estrutura do dente

Uma cavidade devidamente limpa assegura um resultado de máxima adesão. Assegurar que a cavidade se encontra convenientemente limpa.

#### A-2. Controlo da humidade

Para obter o melhor resultado possível, evitar a contaminação da área a ser tratada através de saliva ou sangue. É recomendada a utilização de um clique de borracha, a fim de manter o dente limpo e seco.

#### A-3. Preparação da cavidade

Remover toda a dentina eventualmente infectada, utilizando o detector de caries CARIOS DETECTOR como guia, e preparar a cavidade da forma usual.

#### A-4. Protecção da polpa

Qualquer porção de polpa exposta ou áreas próximas da polpa deverão ser cobertas com um preparado de hidróxido de cálcio de presa dura. Não é necessária a aplicação de um cimento ou obturadora de base. Não utilizar produtos com eugenol para efeitos de protecção da polpa.

#### A-5. Cauterização de esmalte intacto

Existe a possibilidade de a resina se espalhar sobre esmalte intacto, aplicar K-ETCHANT Syringe no esmalte, aguardar 10 segundos, lavar com água e, em seguida, secar.

#### A-6. Protecção da superfície aderente

Aplicar resina composta (por ex., CLEARFIL MAJESTY ES-2) na cavidade, fotopolimerizar, executar o acabamento e polir de acordo com as instruções do fabricante.

#### A-7. Tratamento de próteses

O tratamento de silanização de próteses feitas com materiais estéticos (porcelana, cerâmica híbrida ou resina composta) pode ser executado mediante a aplicação de PRIMER, em associação com CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR.

#### A-8. Cauterização de superfície aderente

Aplicar resina opaca como a CLEARFIL ST OPAQUER para superfícies metálicas, a fim de evitar que o brilho metálico seja visível.

#### A-9. Cauterização de esmalte intacto

Existe a possibilidade de a resina se espalhar sobre esmalte intacto, aplicar K-ETCHANT Syringe no esmalte, aguardar 10 segundos, lavar com água e, em seguida, secar.

#### A-10. Preparação da cavidade

Colocar uma gota de PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-11. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-12. Adesão

Colocar a quantidade necessária de PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-13. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-14. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER em todas as superfícies da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 20 segundos. Tomar as precauções necessárias para evitar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 20 segundos.

#### A-15. Preparações de dente

Remover restaurações existentes e/ou círies, e colocar o pino, poste ou matriz, conforme o caso.

#### A-16. Protecção da polpa

Qualquer porção de polpa exposta ou áreas próximas da polpa deverão ser cobertas com um preparado de hidróxido de cálcio de presa dura. Não utilizar produtos com eugenol para efeitos de protecção da polpa.

#### A-17. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER na totalidade da parede da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 5 segundos. Tomar as precauções necessárias para tratar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 5 segundos.

#### A-18. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-19. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-20. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER em todas as superfícies da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 20 segundos. Tomar as precauções necessárias para evitar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 20 segundos.

#### A-21. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER na totalidade da parede da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 5 segundos. Tomar as precauções necessárias para tratar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 5 segundos.

#### A-22. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-23. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-24. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER em todas as superfícies da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 20 segundos. Tomar as precauções necessárias para evitar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 20 segundos.

#### A-25. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER na totalidade da parede da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 5 segundos. Tomar as precauções necessárias para tratar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 5 segundos.

#### A-26. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-27. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-28. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER em todas as superfícies da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 20 segundos. Tomar as precauções necessárias para evitar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 20 segundos.

#### A-29. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER na totalidade da parede da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 5 segundos. Tomar as precauções necessárias para tratar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 5 segundos.

#### A-30. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-31. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.

#### A-32. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER em todas as superfícies da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 20 segundos. Tomar as precauções necessárias para evitar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 20 segundos.

#### A-33. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER na totalidade da parede da cavidade, utilizando uma escova de pincel descartável. Deixar actuar durante 5 segundos. Tomar as precauções necessárias para tratar o contacto das superfícies tratadas com saliva ou excreções durante, no mínimo, 5 segundos.

#### A-34. Aplicação de primer

Aplicar PRIMER num depósito do prato de mistura imediatamente antes da aplicação.

#### A-35. Aplicação de primer

O PRIMER adquire uma consistência de gel se for exposto a uma luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetre através de janelas). Utilizar uma protecção para bloqueio da luminosidade, a fim de evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no espaço de 3 minutos após o seu doseamento.