



ViscoStat™ Clear

CE 0044 MD

VISKOOSINEN HEMOSTAATTINEN GEELI
25 % ALUMIINIKLORIDI



Metal Dento-Infusor™ -kärki, jossa on Comfort Hub™ - ominaisuus


- Ei aiheuta ikenen värjäymiä
- Pysäyttää vähäisen vuodon²
- Huuhtoutuu helposti²
- Viskoosinen geeli
- Ei haittaa sidostumista³

ViscoStat Clear -hemostaasiaine on 25-prosenttinen alumiinikloridigeeli viskoosisessa, vesipitoisessa liuoksessa. Kudostavallinen piikoostumus eliminoi väliaikaisesti vähäisen vuodon. Hyytymiä ei muodostu eikä hemostaasijäämiä tartu preparointiin, mikä on erityisen tärkeää esteettisellä alueella. ViscoStat Clear -hemostaasiaine ei värjää kova- tai pehmytkudoksia.

ViscoStat Clear -hemostaasiainetta käytetään ientaskun avaamiseen ennen jäljennöksen ottoa sekä verenvuodon ja iennesteen hallintaan korjaavissa ja kirurgisissa hammaslääketieteellisissä toimenpiteissä. Se on tarkoitettu käyttöön Ultrapak-ienlangan ja / tai Dento-Infusor-kärjen kanssa. Geeli helpottaa langan vientiä ientaskuun.

6409 – ViscoStat Clear Dento-Infusor -ruiskupakkaus

4 kpl 1,2 ml:n (1,42 g) ruiskuja
20 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä

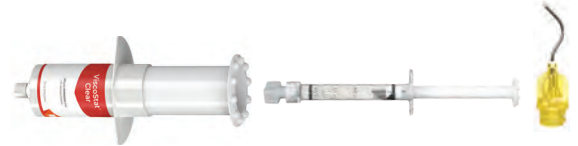

6407 – ViscoStat Clear Dento-Infusor IndiSpense™ -ruiskupakkaus

1 kpl 30 ml:n (38,52 g) IndiSpense-ruisku
20 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä
20 kpl 1,2 ml:n tyhjiä ruiskuja



6410 – ViscoStat Clear -ruisku 20 kpl / pakkaus

1,2 ml:n (1,54 g) ruiskuja



6408 – ViscoStat Clear IndiSpense -ruisku 1 kpl / pakkaus

30 ml:n (38,52 g) ruisku

1. realityesthetics.com. 2. Tiedot arkistossa 3. Tiedot arkistossa.

TOIMENPIDE*



1. Subgingivaalinen preparointi ja vuotava ientasku.



2. Hiero hemostaasiaine tiiviisti vuotavia kudoksia vasten Dento-Infusor-kärjellä. Kirkas geeli mahdollistaa hyvän näkyvyyden ja huuhtoutuu nopeasti pois.



3. Aseta kastettu Ultrapak™-lanka ientaskuun. Jätä se paikalleen 5 minuutiksi.



4. Poista lanka. Puhdista 35 %:lla fosforihapolla. Huuhtele voimakkaalla ilma-vesisuihkulla. Helpottaa hallintaa esteettisellä alueella ilman ikenen värjäymiä.



5. Valmis restauraatio 2 viikon kuluttua toimenpiteen jälkeen.



* Katso käyttöohjeesta kaikki ohjeet.