




Kiilto Pro Erisan Des

Pintadesinfektioaine

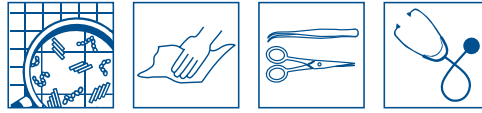

Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen desinfektioaine terveydenhuollon ja hammashuollon erityistarpeisiin: desinfiioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Terveydenhuollon pintojen puhdistus ja desinfektio, pesevänä desinfektioaineena UÄ-pesulaitteissa, veri- ja eritetahradesinfektio. Ei-invasiivisten välineiden ja instrumenttien desinfiioiva puhdistus, invasiivisten instrumenttien esidesinfektio ennen pesua ja sterilointia. Suun terveydenhuollon hoitoyksiköiden pintadesinfektio sekä välineiden ja instrumenttien huolto (mm. ultraäänipesulaitteessa) hygieniavaatimusten mukaisesti.

Tuotekehitetty erityisesti lääkinnällisten laitteiden ominaisuudet huomioiden, soveltuu hyvin herkille materiaaleille: alumiini, kumi, erilaiset muovit.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Desinfektioaineina ovat didekyylidimetyyliammoniumkloridi (kvaternäärinen ammoniumyhdiste), N,N -bis (3-aminopropyli) dodekyyliamiini (alkyyliamiini) sekä 2- fenoksietanoli, joiden yhteisvaikutuksena saavutetaan laajakirjoinen teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan.

Erisan Des tuotteen teho on osoitettu seuraavin testein (testattu pitoisuus suluissa):

- EN 13727 (bakteerit) 5 min (1%)
- EN 13624 (hiivat) 5 min (1%)
- EN 14476 (vaipalliset virukset) 2 min (1%)
- EN 14476 (norovirus) 60 min (5%)
- EN 14561 (bakteerit) 30 min (1%)
- EN 14562 (hiivat) 30 min (1%)
- EN 16615 (bakteerit ja hiivat) 1 min (2%)

Testattu myös:

- EN 13697 (bakteerit) 5 min (0,5%)
- EN 13697 (fungisidinen teho) 15 min (0,5% hiivat, 1% homeet)

Käyttö- ja annostusohje

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen, viileään veteen. Välineliotuksessa käytetään kannellista astiaa. Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Vaihda liuos aina, kun se on näkyvästi likaantunut.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Erisan Des käyttö- ja laimennusohjet	%	Erisan Des	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintadesinfektio / pyyhintä	2	10 ml	490 ml	1 min	Huuhdellaan tarvittaessa
Eritetahradesinfektio	2	10 ml	490 ml	1 min	2-vaiheinen
Välinedesinfektio, upotus	2	20 ml	980 ml	30 min	Huuhdellaan
- norovirus	5	50 ml	950 ml	60 min	Huuhdellaan
- hammashuollon poranterät	100	upotus	-	30 min	Huuhdellaan
Ultraäänipesulaite	5	50 ml	950 ml	30 min	+ liotus yhteensä 30 min, huuhdellaan
	2	20 ml	980 ml		

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Desinfektioaineille herkimmat materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttöiheyden mukaan viikottain tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml).

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Clostridium difficile-epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Didekyylidimetyyliammoniu mkloridi	5-15%	biosidi
2-fenoksietanoli	5-15 %	biosidi
Isopropanolia	<5%	liuotin
Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Trietanoliamiinia	< 5%	pH:n säätelijä
N-(3-Aminopropyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini	<5%	biosidi, pesuteho
Dietanoliamiinia	<1%	korroosiosuoja

Tuotteen pH	11.0 emäksinen
Käyttöliuoksen pH	10.0 heikosti emäksinen
Varastointi	Huoneenlämmössä 3 v.
Ulkonäkö ja tuoksu	Kellertävä neste, ominainen tuoksu
Valmistusmaa	SUOMI
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	<p>Erisan Des desinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).</p> <p>Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.</p>

Pakkaukoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 3 l		8127	6417964081275	6417964482416
12 x 500 ml		8126	6417964081268	6417964482423



Lisätietoja	<p>Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.</p>
--------------------	--