

COE-METALLISET JÄLJENNÖSLUSIKAT - NIKKELIPINNOITETUT

Vain hammashoidon ammattilaisen käyttöön suositelluihin indikaatioihin.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

SUOSITELLUT INDIKAATIOT

Käytetään jäljennösaineiden kanssa jäljennösten ottamiseen.

KONTRAINDIKAATIOT

Harvinaisissa tapauksissa tuote voi aiheuttaa herkkyyttä joillekin ihmisille.

Jos tällaisia reaktioita ilmenee, lopeta tuotteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen.

VAROITUKSET

1. Älä käytä kuivaa lämpösterilointia.
2. Erilaisten kemiallisten desinfointiaineiden/sterilointiaineiden käyttö voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai syöpymistä jäljennöslusikoissa, joten sitä ei suositella.
3. Elektrolyttinen reaktio voi tapahtua, jos jäljennöslusikat laitetaan nesteeseen, jossa on erilaisia metalleja, joka vahingoittaa nikkelpinnoitetta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely

1. COE-METALLISET JÄLJENNÖSLUSIKAT - NIKKELIPINNOITETUT ovat messinkiä, joissa on juotettu retentiolukko ja ne ovat nikkelpinnoitettu. Jäljennöslusikan käsittelyn tulee olla kevyttä ja tehtävä huolellisesti sormilla painaen. Älä käytä pihtejä. Liiallisen kova käsittely tekee halkeamia pinnoitukseen.

Puhdistus

1. Puhdista COE METAL -jäljennöslusikka – nikkelpinnoitettu, poistamalla suurin osa jäljennösaineesta jäljennöslusikasta.
2. Upota jäljennöslusikka COE TRAY CLEANER -liuokseen ja lämpimään veteen 15-30 minuutiksi. Pinttyneet alginaattijäämät voidaan sitten poistaa kevyesti harjaamalla pehmeällä harjalla. COE TRAY CLEANER:ia ja lämmintä vettä voidaan käyttää vahan ja erilaisten aineiden poistamiseen.

Sterilointi

1. COE-METALLISET JÄLJENNÖSLUSIKAT – NIKKELIPINNOITETUT voidaan steriloida autoklaavissa 250 ° F / 121 ° C: ssa 30 minuutin ajan. Jäljennöslusikat tulee säilyttää kuivina.

VARASTOINTI

Säilytä jäljennöslusikat kuivassa paikassa.

PAKETIT

Perforoitu Regular – pieni, keskikokoinen, suuri ylä- ja alaleuka

Sileä Regular – pieni, keskikokoinen, suuri ylä- ja alaleuka

Saatavilla myös lastenlusikka ja Extra Long.

Muokattu viimeksi: 06/2013