




# Kiilto Pro Alu Deko

## Terveydenhuollon konepesuaine

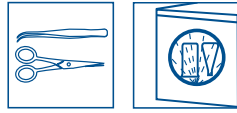

Nestemäinen, vaahtoamaton konepesuaine huuhtelu- ja pesudesinfektiolaitteisiin terveydenhuollon ja suun terveydenhoidon eri toimipisteissä.

### Käyttökohteet

Välinehuollon ja toimenpideyksiköiden pesu-desinfektiokoneet, myös keskitettyihin välinehuoltoihin. Osastojen huuhtelu-pesukoneet, suun terveydenhuollon pesu-desinfektiokoneet.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

### Tuot ominaisuudet

Alu Deko on tuotekehitetty yleisesti terveydenhuollossa käytettävien konepestävien instrumenttien, välineiden ja materiaalien pesuun. Alu Deko konepesuaineessa on käytetty mahdollisimman työturvallisia ja ympäristömyötäisiä, tutkittuja raaka-aineita. Puhdistusteho on optimoitu ja testattu terveydenhuollon erityisvaatimusten mukaisesti (Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio). Tuote soveltuu myös herkille materiaaleille. Vaahtoamaton.

### Käyttö- ja annostusohje

Liitä kanisteri pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellinen annostus huuhtelu- ja pesu-desinfektiokoneissa on n. 0,3 % käyttöliuos, 30 - 70 ml /pesu. Annostukseen vaikuttavat pestävä materiaali ja veden laatu. Paras puhdistustulos saadaan 45-55°C pesulämpötilassa. Kone lämpödesinfioi puhdistetut ja huuhdotut instrumentit sekä kammion valitun pesuohjelman mukaisesti.

### Huomioitavaa

Huomioi laitteen täytössä, että vesisuihkut pääsevät pestävien välineiden kaikille pinnoille. Aseta pestävä välineistö väljästi koneeseen. Käytä tarvittaessa erikoistelineitä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava määräajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Noudata instrumenttivalmistajien erikoisohjeistuksia.

### Koostumus

	Tehoaine	Vaikutus
Kompleksointiainetta	5-15 %	sitovat veden kovuustekijöitä
Polykarboksylaattia	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa, sitoo sen veteen
Natriummetasilikaattia	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja
Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta

### Tuotteen pH

13.0 vahvasti emäksinen

### Käyttöliuoksen pH

11.0 emäksinen

### Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

**Ulkonäkö ja tuoksu**

Kirkas, kellertävä neste

**Valmistusmaa**

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-  
turvallisuus**

Alu Deko konepesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 5 l	80387	6417964803877	6417964482577
1 x 20 l	8084	6412600080841	
1 x 200 l	8280	6438160082804	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.fi](http://www.kiilto.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).