

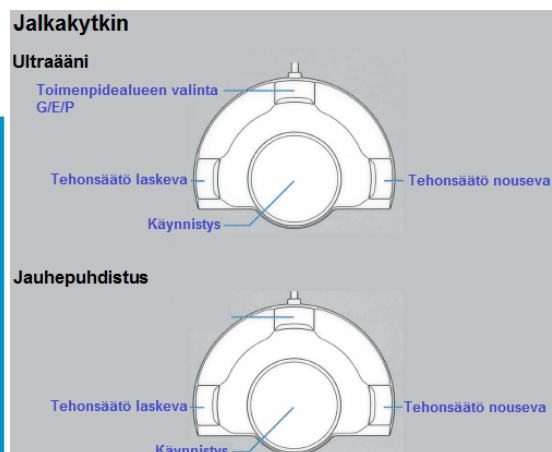


NSK Varios Combi Pro pikakäyttöopas

Symbolit ja niiden merkitykset

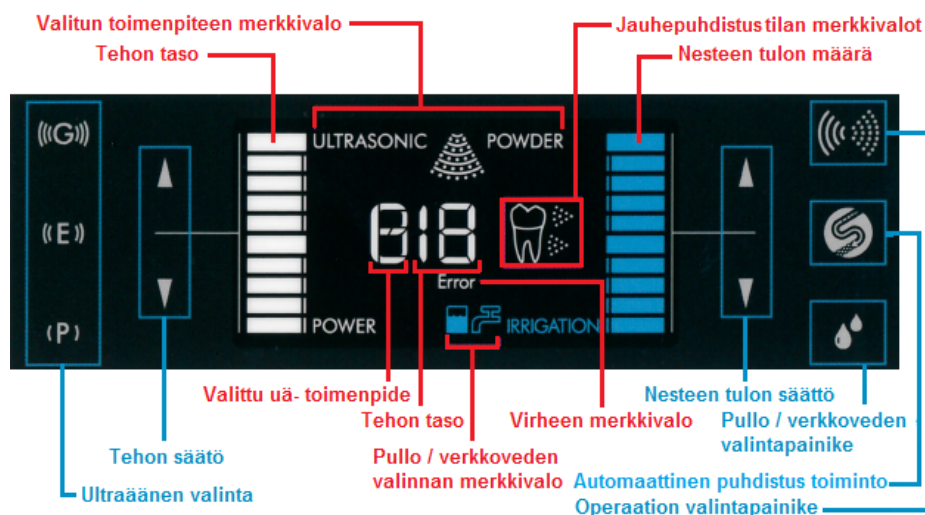

Varios ultraäänilaite

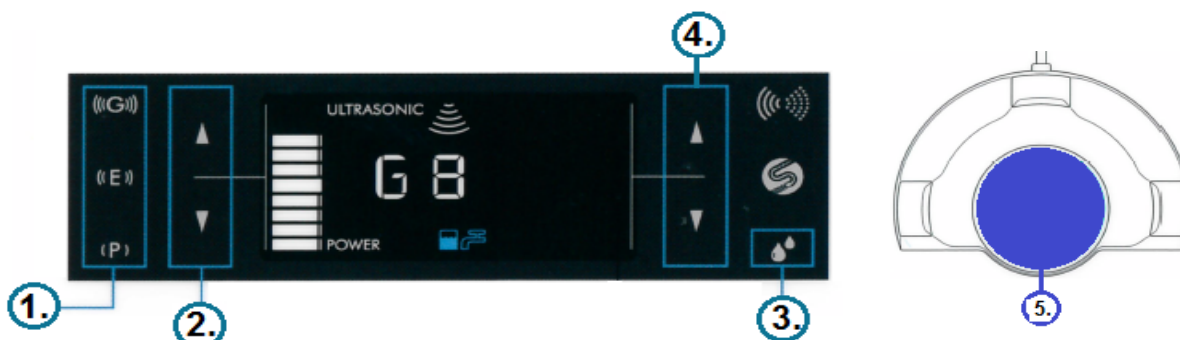


1. Valitse toimenpidealue (G, E, P)
2. Aseta kärjelle kuuluva teho (noudata valmistajan suositusta kärkien tehoista)
3. Valitse nestesäiliö tai verkkovesi käyttövedeksi
4. Aseta vesimäärä
5. Monitoimijalkakytkimen keskimmäinen pyöreä painike käynnistää toiminnon

Laitetta käyttäessä:

voit muuttaa: ultraäänen tehoa sekä nesteen määrää


Et voi muuttaa: toimenpidettä, toimenpidealuetta, käyttövedettä (nestesäiliö / verkkovesi) tai aloittaa automaattista ultraäänen puhdistus toimintoa (AC)

Jauhepuhdistimet

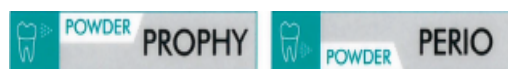

Toimintatilan kuva	Säiliö	Käytettävä jauhe
 Prophy (supragingivaalinen)	Prophy säiliö	NSK Flash pearl
 Perio (subgingivaalinen)	Perio säiliö	NSK Perio-mate powder

Pyöritä säiliön kanta, kunnes se asettuu tiukasti paikoilleen. Kytke säiliö sitten suorana keskusyksikön liittimeen.

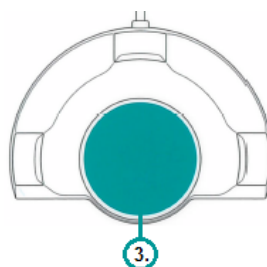

1. Aseta jauhemäärän voimakkuus
2. Aseta vesimäärä
3. Monitoimijalkakytkimen keskimmäinen pyöreä painike käynnistää toiminnon

Toiminnon ollessa päällä:

Voit muuttaa: jauhepuhdistuksen tehoa sekä nesteen määrää
Et voi muuttaa: käyttövetä tai aloittaa automaattista puhdistusta

Paineilman vapauttaminen

Vapauta paine aina ennen jauheen lisäämistä tai jos olet irrottamassa jauhesäiliötä keskusyksiköstä.

1. Paina ja pidä pohjassa ”automaattinen puhdistus painike” kunnes kuulet keskusyksiköstä 2 piippausta (noin 1 sekunti). HUOM! Automaattinen puhdistus toiminto (AC) käynnistyy, mikäli painiketta pidetään pohjassa yli 3 sekuntia.
2. Toiminto loppuu automaattisesti paineilman vapauduttua säiliöstä. Nyt voit jauhesäiliön kannen tai irrottaa säiliön.

Automaattinen puhdistus Varios ultraäänelle



1. Irrota käsikappaleesta kärki.
2. Irrota nestesäiliö ja pese se juoksevalla vedellä.
3. Täytä nestesäiliö noin puolilleen Biofinndent nestettä.
4. Valitse nestesäiliön käyttö keskusyksiköstä
5. Aseta käsikappaleen pää nestesäiliön sisään välttääksesi ulostulevan nesteen roiskuminen.
6. Paina ja pidä painettuna ”automaattinen puhdistus painike” noin 3 sekunnin ajan aloittaaksesi automaattinen puhdistustoiminto. Automaattinen puhdistus kestää noin 45 sekuntia.




Automaattinen puhdistus jauhepuhdistimille

- Poista kertakäyttökärki kärkisuuttimen päästä (vain perio käsikappale) ja aseta käsikappaleen kärkisuutin altaan tai sylkykupin yläpuolelle (prophy ja perio)
- Paina ja pidä painettuna ”automaattinen puhdistus painike” noin 3 sekunnin ajan aloittaaksesi automaattisen puhdistuksen (AC). Automaattinen puhdistus kestää noin 45 sekuntia. **HUOM:** älä vapauta painiketta laitteen piipatessa kahdesti vaan vasta, kun seuraavat merkit ilmestyvät näytölle (katso kuva). Automaattinen puhdistus huuhtelee ja kuivaa letkun sekä käsikappaleen automaattisesti.
- Mikäli haluat lopettaa automaattisen puhdistuksen ennen määräaikaa, paina ”automaattinen puhdistus painiketta” uudelleen.

Jauhesäiliöiden ja letkun puhdistus

- Suorita automaattinen puhdistus ennen säiliön puhdistusta poistaaksesi jauheen ja veden jäämät käsikappaleesta ja letkusta.
- Vapauta säiliön paineilma, anna paineen poistua ja paina sitten säiliön lukituksen vapautinta ja nosta säiliö suoraan ylöspäin.
- Avaa säiliön kansi ja poista ylimääräinen jauhe säiliöstä.
- Kierrä letku irti säiliöstä.
- Poista loput jauheet säiliöstä käyttämällä paineilmaa.
- Pyyhi letku ja sen liitin kostealla liinalla.
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhdistusharjaa poistaaksesi jauhe jäämät käsikappaleen ja kärkisuuttimen liitoksista. Puhdista myös letkun käsikappaleen puoleinen liitin.

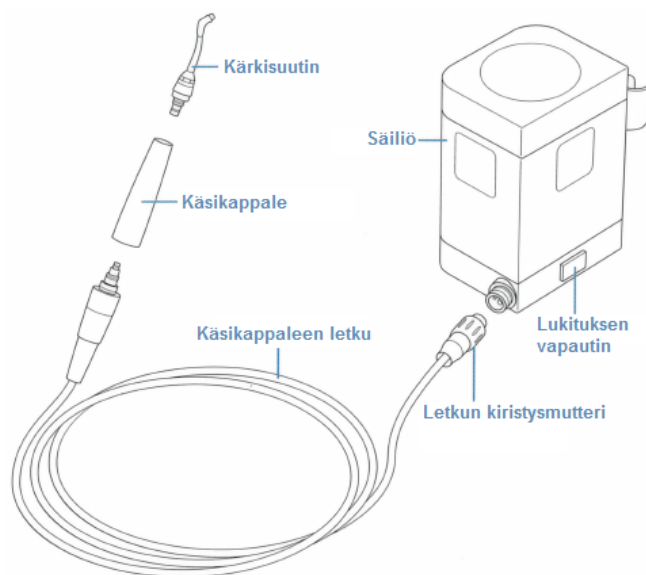

vikakoodi	vikakoodin nimi	Tarkista / ratkaisu
0	Järjestelmä vika	Käynnistä keskusyksikkö uudelleen.
1	24V jännitteen poikkeavuus	
2	12V jännitteen poikkeavuus	
3	Pumpun virtauksen poikkeavuus	Tarkista laitteen vesipumpun kiinnitys .
4	Paineilman poikkeavuus	Tarkista laitteeseen liitetyn paineilmaletkun paine.
5	Lämpöjännite poikkeavuus	Käynnistä keskusyksikkö uudelleen.
6	Lämpövirta poikkeavuus	
7	Laitteen sisäisen lämpötilan poikkeavuus	Tarkista laitteen veden saanti. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä hetki.
8	Jalkakytkimen yhteys virhe	Tarkista jalkakytkimen kiinnitys.
9	Ultraäänikappaleessa poikkeavuus	Tarkista käsikappaleen ja käsikappaleen letkun kiinnitykset.
12	Kosketuksen tunnistimen poikkeavuus	Käynnistä keskusyksikkö uudelleen.
13	Laitteen itsetarkistus epäonnistui	
14	Ultraäänilaitteen järjestelmä virhe	

Mikäli vika ei ratkea yllä mainituilla ohjeilla, ota yhteyttä valtuutettuun NSK huoltopisteeseen.

huolto@unident.fi

marika.jauhiainen@unident.fi

heikki.nick@dsnack.fi

info@unident.fi