



WipeClean Universal Cleaning

Yleispuhdistuspyyhe



Puhdistavat kertakäyttöpyyhkeet pinnoille, ammattikäyttöön.

Käyttökohteet

Kertakäyttöiset pesevät pyyhkeet kosteapyyhintää sietävien pintojen puhdistukseen esim. sairaaloissa, hoitolaitoksissa, saniteettitiloissa, päivähoidossa, hammaslääkäriasemilla, lentokoneissa, junissa, laivoissa, autoissa ja toimistoissa.

Tuoteminaisuudet

Hajustamaton pesuaine ja pehmeä, sopivan paksuinen pyyhemateriaali puhdistavat ja kostuttavat pinnat hyvin, pyyhintäjälkiä jättämättä. Viskoosia sisältävä pyyhemateriaali poistaa ja sitoo likaa tehokkaasti. Pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen. Kansiosassa merkintäalue käyttöönottopäiväykselle. Avatun pakkauksen käyttöaika max.12 kk.

Käyttö- ja annostusohje

Puhdista käsiteltävä pinta pyyhkimällä, kunnes lika on saatu poistettua. Pyyhittyä pintaa ei tarvitse kuivata. Pyyhe riittää 1 m² alueelle. Noudata paikallisia ohjeita suojakäsineiden käytöstä. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| Aqua | > 95% | vesi |
| Pinta-aktiivaineita | < 1 % | puhdistusteho |
| Fenoksietanolia | | säilöntäaine |

Muu koostumus

Pyyhekoko 20x30 cm. Pyyhe pehmeä, kuitukangasta, 50 gsm (1 m* 1m) 70% polyester/30% viskoosi.

Varastointi

Säilytä pakkaukset kuivassa, jäätymättömässä tilassa, suoralta auringonvalolta suojattuna. Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen pyyhemateriaali, hajusteeton ja miltei tuoksuton.

Valmistusmaa

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Pyyhepakkaus on ulkokuoreltaan pet/pe muovia. Pyyhepakkaus ja pyyhkeet ovat energia- tai yhdyskuntajaetta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

20 x 25 kpl

5231

5701684523124

5701684523117

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.