

Composi-Tight® 3D Fusion™ potilastapaukset

Mukautuu hyvin hampaaseen, siksi hammasvälejä ei tarvitse muotoilla hiomalla.



Images courtesy of Dr. Amar, DDS, France

Laajat kaviteetit voidaan käsitellä yhdessä työvaiheessa, kun on oikea rengas (vihreä FX600).



Images courtesy of Dr. Nikhil Sethi, BDS (Lon) Msc (Lon), Birmingham, UK

Vastakkaiset kaviteetit vaativat oman tekniikkansa - voimme näyttää miten.*



Images courtesy of Dr. Jeffrey Kelley, DDS, Zeeland, MI

Koko neljännes voi olla haastava. Opi oikeat temput ammattilaisilta.



Images courtesy of Dr. Mike Malone, DDS, Lafayette, LA

* Täydelliset selostukset, tapaukset ja arviot löytyvät osoitteesta www.garrisdental.com/learning-center. Onko sinulla tapaus jonka haluat jakaa?

The Award Winning Composi-Tight® 3D Fusion™ Sectional Matrix System



K O K E M U K S I A

„3D-renkaat ovat Garrisonin järjestelmien ydin. Renkaan "V"-muoto, joka sopii approksimaalialueelle, saa matriisin istumaan hyvin kaviteetin bukkaali- ja palatinaalireunoja myötäillen. Näin yhdistelmämuovin vienti kaviteetin reuna-alueille on helpompaa ja samalla lopullisen muotoilemisen tarve matriisin poiston jälkeen jää hyvin vähäiseksi. Renkaat mahdollistavat myös approksimaalipintojen divergoinnin jolloin saadaan erinomainen kontaktipiste. Garrisonin järjestelmät tekevät II-luokan restauraatiot helpommiksi tehdä ja ennako-odotusten mukaisiksi, samalla ne vähentävät viimeistelyyn tarvittavaa aikaa matriisin poiston jälkeen.“

Enrico Cogo, DDS
Legnago, Ferrara and Goito, Italia

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System



Laajoihin preparointeihin uusi vihreä Composi-Tight® 3D Fusion™ -renkas Erinomainen laajojen avausten korjaamiseen. Pysyy vaikka kuspipi puuttuisi. Leveät silikonikärjet estävät matriisia painumista kaviteettiin.
Tuote FX600 (2kpl/pakkaus)



Oranssi Composi-Tight® 3D Fusion™ -renkaassa on nyt retentiokärjet Ultra-Grip™ -retentiokärjet estävät kaikkien Composi-Tight® 3D Fusion™-renkaiden liukumisen paikoiltaan. Parannettu muoto helpottaa renkaan avaamista ja paikalleen asettamista huomattavasti. Pysyy myös isoilla molaareilla.
Tuote FX500 (2kpl/pakkaus)



Suosittu sininen Composi-Tight® 3D Fusion™ on nyt entistä kevyempi avata Pehmeä silikoni muotoutuu paremmin reuna-harjun anatomiaan. Toimii mainiosti lyhyillä hampailla ja virheasennoissa. Pysyy myös kofferdamrenkaan päällä tai kulmahampaan ja ensimmäisen premolaarin välissä.
Tuote FX400 (2kpl/pakkaus)



Kliininen vinkki


Jos interproksimaalinen kontakti on liian tiukka restauration matriisinauhan asettamiseksi, aseta kontaktiin sininen rengas ja odota noin 20 sekuntia, kunnes kontakti on hieman auki, poista rengas ja aseta sitten matriisinauha.

Tuote	Kuvaus
FX600	Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas vihreä, Laajat preparoinnit, (2kpl/pakkaus)
FX500	Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas oranssi pitkä (2kpl/pakkaus)
FX400	Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas sininen, lyhyt (2kpl/pakkaus)
FXR01	3 kpl Composi-Tight® 3D Fusion™ renkaita (1 rengas jokaista kokoa)
FXP01	Muottitaotut rengaspihdit

Näitä olemme parantaneet:

UUTUUS! Kestää pitkään uuden valmistusmenetelmän ansiosta.

Ultra-Grip™ retentiojärjet estävät kaikkien Composi-Tight® 3D Fusion™-renkaiden liukumisen paikoiltaan.

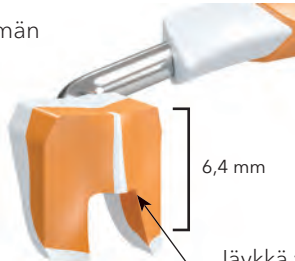

6,4 mm



4,7 mm

Jäykkä ydin ohjaa separointivoiman hammasväliin, jossa se on tehokkain.

Pehmeät Soft-Face™ kärjet painavat renkaita tarkasti hampaan pintaan ja estävät ylimäärät.




Composi-Tight® 3D Fusion™: Composi-Tight® 3D sektorimatriisijärjestelmä voitti Dental Advisor Awardin kategoriassa "Top Sectional Matrix" 12. kerran peräkkäin!



The Dental Advisorin Top Sectional Matrix System 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, sekä Toimittajan Valinta.

Ensimmäinen rengas jossa on laajoihin preparointeihin sopivat ekstrasuuret silikonikärjet.

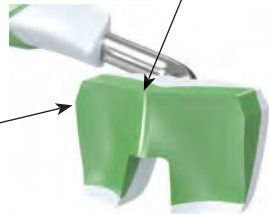

erikoislevää

Voidaan pinota päällekkäin - Tru-Stack™ - teknologia sallii oranssin renkaan sijoittamisen sinisen renkaan päälle, jolloin MOD:t ja useamman hampaan paikkaukset helpottuvat.

Kliininen vinkki

Vie Composi-Tight® 3D Fusion™-rengas lähelle matriisia pitäen rengasta lähes pystysuuntaan vinoissa. Avaa rengas. Sen jälkeen paina (mesiaalikäiveteetti) tai vedä (distaalikäiveteetti) rengas matriisiin kiinni. Näin matriisinauha asettuu hammasta vasten. Aseta rengas kiilan päälle niin lähelle ientä kuin mahdollista. Irrota sen jälkeen pihtien ote.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System



FX-KFF-00-VM



Käyttöohjeet



Kliininen vinkki

Kaikki Composi Tight® 3D Fusion™ -settimme komponentit on sovitettu yhteen parhaiden tulosten saavuttamiseksi luokan II komposiitirestaurationeissa. Saat anatomisesti oikeat kontaktit hintaan 2,29 € per luokan II restauratione.

Kaikilla lajitelmilla on 60 päivän Rahat takaisin-takuu.**

Tuote	Kuvaus
-------	--------

FX-KFF-00-VM All-in-One pakkaus	1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas sininen lyhyt, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas oranssi pitkä, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas vihreä iso, 80x Composi-Tight® 3D Fusion™ kiilaa, 4 kokoa, 70x Composi-Tight® 3D Fusion™ nauhaa, 5 kokoa (20x kutakin harmaa 4,4mm, violetti 5,6mm, vihreä 6,6mm; 5x kutakin punainen 6,0mm, sininen 8,7mm) 1x muottitaotut rengaspihdit (s. 41) 4x VariStrips (s. 29) 5x Margin Elevation Bands (s. 36-37)
--	--

FX-KFF-04 Täydellinen valikoima

Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00 Aloituspakkaus,
1x BFA-1 Taivutetut kärjet okklusaaliseen vientiin (s. 40)

FX-KFF-01 Täydellinen valikoima

Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00 Aloituspakkaus,
1x BFA-1 Taivutetut kärjet okklusaaliseen vientiin (s. 40)
1x TN009 Monikäyttöinen instrumentti (s. 40)



** Ellei tuote tydydyt, palauta se meille hammastarvikeliikkeesi kautta ja saat täyden hyvityksen.

Sopeutuu joka hampaaseen!

Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non-Stick Matrices

	Premolaarit	Premolaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi	Premolaarit ja pienet molaarit	Molaarit	Molaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi
Composi-Tight® 3DFusion™ Matriisinauhat					
0,038 mm ohut					
Korkeus	4,4 mm	4,1 mm Subg. 6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	6,0 mm Subg. 8,7 mm
Tuote	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Lukumäärä	100 kpl	60 kpl	100 kpl	100 kpl	60 kpl



Täydellinen nauhalajitelma, 420 nauhaa, kaikkia kokoja (jokaista 100: harmaa 4,4mm, violetti 5,6mm, vihreä 6,6mm; jokaista 60: punainen 6,0mm, sininen 8,7mm) hintaan

FXB01

Täydellinen nauhalajitelma, 210 nauhaa, kaikkia kokoja (jokaista 50: harmaa 4,4mm, violetti 5,6mm, vihreä 6,6mm; jokaista 30: punainen 6,0mm, sininen 8,7mm) hintaan

FXB02

Kliininen vinkki

Käytä sahalaitaista FitStrip™-nauhaa (katso sivu 34) tiukkojen kontaktien avaamiseen, näin nauhat liukuvat kevyesti paikoilleen.

Kliininen vinkki

Käytä PerForm™-kontakti-instrumenttia (kts. sivu 28), jotta tarttumattomalla pinnoitteella päällystetyt nauhat mukautuvat täydellisesti hampaaseen naarmuttamatta nauhoja.



Tuote CFK01

Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Sectional Matrix System



FX-HHF-00



Verkkoluettelo

Kliininen vinkki

Käytä Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrix -nauhoja erityisen tiukkoihin kontakteihin. Nämä nauhat ovat vakaampia eivätkä ne taivu yhtä helposti kuin deadsoft-nauhat, kun niitä asetetaan paikalleen.



FX-HHF-00



Tuote	Kuvaus
FX-HHF-00 Aloituspakkaus	1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas sininen lyhyt, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas oranssi pitkä, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ rengas vihreä iso, 80x Composi-Tight® 3D Fusion™ kiilaa, 4 kokoa, 70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm nauhaa, 5 kokoa (20x kutakin premolaari 4,3 mm, premolaari/pieni molaari 5,3 mm, molaari 6,1 mm; 5x kutakin pieni kohdunkaula 5,9mm, molaari/suuri kohdunkaula 7,7mm), 1x muottitaotut rengaspihdit

** Ellei tuote tyydytä, palauta se meille hammastarvikeliikkeesi kautta ja saat täyden hyvityksen.

Uusi eZ-Place™-teknologia

Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Matrix Bands

	Premolaarit	Premolaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi	Premolaarit ja pienet molaarit	Molaarit	Molaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi
Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matriisinauhat					
0,038 mm ohut					
Korkeus	4,3 mm	4,3 mm Subg. 5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	6,1 mm Subg. 7,7 mm
Tuote	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
Lukumäärä	100 kpl	100 kpl	100 kpl	100 kpl	100 kpl



Täydellinen nauhalajitelma, 300 nauhaa, kaikkia kokoja (jokaista 60: premolaari 4,3mm, pieni kohdunkaula 5,9mm, premo-laari/pieni molaari 5,3mm, molaari 6,1mm, molaari/suuri kohdunkaula 7,7mm) hintaan **FXHB04**

Uudet Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm matriisinauhat, joissa on **eZ-Place™ teknologia**, säilyttävät muotonsa paikalleen asettamisen aikana. Se tekee niiden käytöstä **merkittävästi helpompaa!**

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm -nauhat **vastustavat muodonmuutosta melkein 70 % paremmin** kuin tyypilliset täysin pehmeät nauhat. Ne ovat silti esimuotoillut ja superohuet eli vain 0,038 mm.

Erikoiskäsitelty ruostumaton teräs varmistaa ettei nauha taivu, kun se asetetaan paikalleen.

Esimuotoiltu ja vain 0,038 mm superohut. Saat erinomaiset, tiukat kontaktit ja juuri sen ihanteellisen anatomian, johon olet tottunut kun käytät Composi-Tight® 3D Fusion™ -järjestelmää.