



Ultrapak™
NEULOSLANKA



- Alkuperäinen neuloslanka
- Takaa nopean kudoksen siirron, tarkat ienreunat laadukkaita jäljennöksiä varten
- Helpommin pakattava ja pysyy paremmin paikallaan kuin kierretty tai punottu lanka
- Ultrapak puristuu kokoon pakkaamisen aikana ja laajenee sitten avaten ientaskun
- Lanka ei tartu timanttiporaan
- Kirkkaat värit helpottavat tunnistamista ja poistamista

Ultrapak-lanka on valmistettu 100-prosenttisestä puuvillasta neuloen tuhansien pienten silmukoiden ketjuksi. Tämä ainutlaatuinen neulosmalli antaa hellävaraisen ulospäin suuntautuvan voiman asettamisen jälkeen, kun neulosilmukat pyrkivät avautumaan. Optimaalinen ientaskun avautuminen tapahtuu 1–3 minuutissa.

Ultrapak™-langalla voidaan myös viedä rautasulfaattiliuoksia ikenen alle ientaskunesteen hallitsemiseksi. Ultrapak™-lanka on tarkoitettu tehostamaan kudoshallintatekniikoita, joissa käytetään ViscoStat™- tai Astringedent™-hemostaasiainetta. Myös tavanomaisia tekniikoita, joissa käytetään alumiinia tai alumiinikloridia jne., voidaan tehostaa käyttämällä litteitä Ultrapak™-neuloslankoja, jotka imevät enemmän hemostaasiiliuosta kuin tavalliset langat.




THE ONE WITH THE STRIPE!® (RAIDALLINEN STRIPE!™ -LANKA)

Helpon pakkaustavan, erinomaisen imeytyvyyden sekä ainutlaatuisen retention ansiosta Ultrapak-neuloslanka on ollut hammaslääkärien ensisijainen valinta jo useita vuosia.

”CAN’T LIVE WITHOUT” -tunnustus tunnetulta riippumattomalta tutkimuslaitoksesta.²

Ultrapak™-langan ja kilpailevan tuotteen imeytyvyyden vertailu

Tiedot ilmaisevat Ultrapak™-neuloslangan ja tärkeiden kilpailijoiden tuotteiden imeytyvyysominaisuudet.*

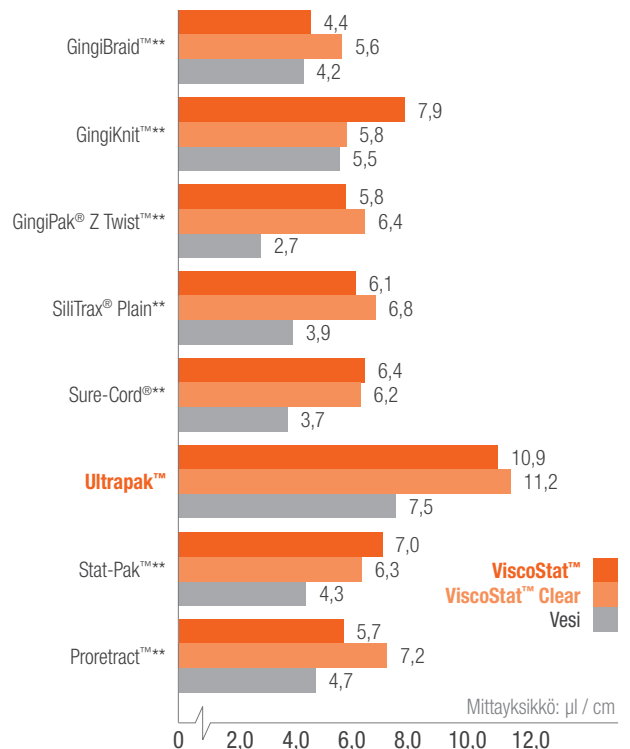

*Tiedot arkistossa. **Muun kuin Ultradentin tavaramerkki. 1. realityesthetics.com 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

Pullo sisältää
244 cm lankaa.



9330

Ultrapak™-sarja

1 kpl kutakin lankakokoa 00, 0, 1
ja 2
1 kpl Ultrapak-teline



#000



- Alempi lanka kaksilankatekniikassa
- Etuhampaat
- Kaksoispakkaus

9331

Ultrapak™-lanka 000, täyttöpakkaus



#00



- Laminaattien preparointiin ja sementointiin
- Korjaavat toimenpiteet, joissa käsitellään ohuita, hauraita kudoksia

9332

Ultrapak™-lanka 00, täyttöpakkaus



#0



- Alaetuhampaat
- Ikenen lähellä ja alla olevien laminaattien sementointiin
- Luokkien III, IV ja V täytteet
- Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa

9333

Ultrapak™-lanka 0, täyttöpakkaus



#1



- Kyllästämättömät koot 1 ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudoshallinnassa ja/tai ientaskun avauksessa kastettuna koaguloivaan hemostaasiuokseen ennen kruunupreparointeja tai niiden jälkeen
- Suojalanka ennen preparointia etuhampaissa

9334

Ultrapak™-lanka 1, täyttöpakkaus



#2



- Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa
- Suojalanka ennen preparointia

9335

Ultrapak™-lanka 2, täyttöpakkaus



#3



- Alueet, joissa on melko paksu ienkudos ja joilla tarvitaan huomattava määrä voimaa
- Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa

9336

Ultrapak™-lanka 3, täyttöpakkaus



Huomautus: Älä käytä rautasulfaattituotteiden (ml. ViscoStat-, Astringedent- ja Astringedent X -hemostaasiaineet) kanssa adrenaaliinivalmisteita, sillä se johtaa sini-mustan kerrostuman muodostumiseen.



Preparointia edeltävä asetustekniikka ennen pakkaamista

Varmistaaksesi langan pysymisen preparoinnin aikana käytä niin isoa langaa, että se painautuu tiiviisti ientaskuun.



1. ESIPAKKAUS

Aseta hemostaasiaineella kastettu Ultrapak™-neuloslanka paikalleen. Valitsemalla hieman liian suurelta vaikuttavan langan varmistat langan pysymisen paikallaan. Ohuella Ultrapak™ Packer -pakkausinstrumentilla lanka saadaan helposti painettua paikalleen. Neuloslangan ainutlaatuinen rakenne (siimukkaverkko) helpottaa pakkaamista ja paikallaan pysymistä.



2. PREPAROINTI

Ulota reuna subgingivaalisesti poraamalla osittain neuloslankaan, joka ei tartu timanttiporaan. Poista langan jäämä sopivalla instrumentilla. Vuoto on hyvin vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Pieni osa preparointimatonta hammasta kiinnittyneen gingivan yläpuolella säilytetään merkinä jäljennöksessä. Jos ientaskua pitää avata enemmän, pakkaa uusi sopivan kokoinen lanka. Huuhtele, kuivaa ilmapuustilla ja ota jäljennös.

Digitaalisia jäljennöksiä varten – Täydellinen hemostaasi



1. HEMOSTAASI

Täydellinen hemostaasi on tärkeää erityisesti digitaalisten jäljennösten aikana, jotta restauration tarkka sopivuus ienreunoihin voidaan taata.



2. HYVÄ NÄKYVYYS

Kun hemostaasi on saavutettu ja kudoksen vedetty sivuun, preparointi on valmis digitaalisiin jäljennöksiä varten.

Kaksilankatekniikka

Suurimmat haasteet laadukkaiden jäljennösten ottamisessa ovat kudoksen avaus sekä riittävä kosteuden hallinta. Kokeile kaksilankatekniikkaa ja tehokkaita hemostaasiaineita, jotta saavutat molemmat.



1. ENSIMMÄINEN LANKA

Kun hemostaasi on saavutettu, aseta varovasti yksi lanka – kuten Ultrapak™-neuloslanka 0 tai 00 – mahdollisimman syväälle ientaskuun. Aseta langat oikein ja tehokkaasti paikalleen Fischer's Ultrapak -pakkausinstrumentin avulla.




2. TOINEN LANKA

Aseta toinen paksumpi ja hemostaasiaineella kastettu lanka paikalleen kudoksen lateraalista laajentamista varten.



3. HUUHTELU/KUIVAUS

Huuhtelee alue hyvin, kuivaa hieman ja ota jäljennös.

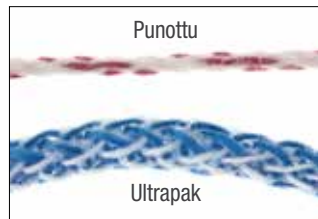

Ultrapak-neuloslanka valmistettiin neuloen tuhansien pienten silmukoiden ketjuksi niin, että se puristuu ja laajenee muita lankoja helpommin. 100 % puuvillakuidut imevät hemostaasiaineita ja ientaskunesteitä tehokkaasti.



Ultrapak-lanka puristuu ensin kokoon pakattaessa ja laajenee sitten optimaalista kudoksen siirtoa varten.



Hemostaasiliuoksella kostutettu Ultrapak-lanka verenvuodon ja ientaskunesteen hallintaan gingivaalisissa ja subgingivaalisissa preparoinneissa.



Ultrapak CleanCut -tuotteen korkkiin integroitu leikkuri helpottaa langan leikkausta. Erityinen annosteluaukko estää langan puotamisen pulloon.