



Nämä käyttöohjeet viittaavat seuraaviin artikkeleihin:

Sekoituslohkot Kulutusta kestävä	60 arkki	40 arkki	25 arkki	35 arkki
REF	80800	80801	80802	80803
Koko	universaali (u)	pieni (a)	medium (b)	suuri (c)
Mitat	7,0 x 8,0 cm	3,5 x 4,5 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Pakkausyksikkö	10 lohkot	10 lohkot	10 lohkot	5 lohkot



Liukastumista sekoituslohkot Liukumaton alapuoli	60 arkki	25 arkki	35 arkki
REF	80820	80822	80823
Koko	universaali (u)	medium (b)	suuri (c)
Mitat	7,0 x 8,0 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Pakkausyksikkö	10 lohkot	10 lohkot	5 lohkot

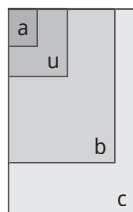

Pergamentsekoituslohkot Kulutusta kestävä	75 arkki	75 arkki	75 arkki
REF	80950	80951	80952
Koko	pieni (d)	medium (e)	suuri (f)
Mitat	4,0 x 4,0 cm	7,0 x 10,0 cm	14,0 x 20,0 cm
Pakkausyksikkö	10 lohkot	10 lohkot	10 lohkot

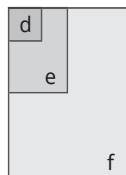

Liukastumista sekoituslohkot Liukumaton alapuoli	100 arkki	100 arkki
REF	80830	80834
Koko	universaali (u)	suuri (g)
Mitat	7,0 x 8,0 cm	8,0 x 14,0 cm
Pakkausyksikkö	1 lohko	1 lohko

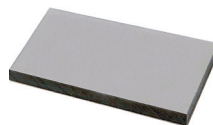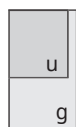

Sekoituslohkot Mattapintainen pinta	40 arkki
REF	80811
Koko	pieni (a)
Mitat	3,5 x 4,5 cm
Pakkausyksikkö	12 lohkot





REF 80812, 80826, 80829, 80840, 80845, 80870, 80871, 80872, 80873, 80874, 80875, 80876, 80877, 80901, 80902, 80903, 80930, 80931, 80932, 80939, 80940, 80941, 80942, 80943, 80944, 80945, 80946, 80955, 80956, 80960, 80961, 80962, 80970, 80971, 80972, 80973, 80974, 80975, 81800, 81802, 81803

133645, 144114, 144115, 147667, 147684, 147685, 185744, 185968, 185969, 209927, 239720, 2820045, 2820050, 2820055, 2820110, 2820220, 2820245, 2S00440, 2S00441, 2S00443, 496531, 496542, 498044, 498099, 498102, 500209, 500323, 500334, 5-639, 5-640, 5-641, 5-642, 5-698, 5-699, 704180, 704188, 704203, 704207, 704212, 704215, 7042218, 7042219, 7071, 7072, 7073, 7074, 90485, 90490, CTB015, CTC050, CTC051, CTD021, CTM051, CTM052, CTP011, PFU105, PSP18050


Ref. no. voi poiketa jälleenmyyjän ref. no.:sta. Käytä jälleenmyyjän viitenumeroa tilatessasi.



- Yksittäisten komponenttien soveltaminen: Levitä komponentit sekoitustynyn päällimmäiselle levyille valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Komponenttien sekoittaminen: Sekoita komponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti, kunnes saadaan homogeeninen massa.

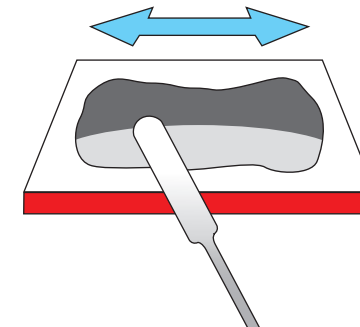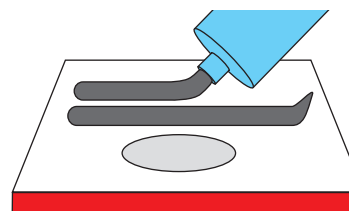

- Seoksen poistaminen: Voit nyt poistaa valmiin seoksen sekoituslualustalta jatkokäsittelyä varten.

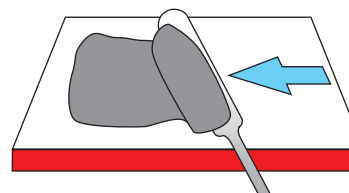

- Hävittäminen: Revi käytetty levy irti lohkokista ja hävitä se roskeen.

Käyttötarkoituksella

Sekoitusblokkeja käytetään hammassementin, komposiittien tai jäljennösmateriaalin eri komponenttien manuaaliseen sekoittamiseen hammaslääkärin vastaanotolla. Sekoitustyynyn kertakäyttöiset, yksittäiset sivut toimivat pintana, jolle yksittäiset komponentit levitetään. Kun materiaali on sekoitettu sekoituslohkossa, sitä voidaan käyttää suoraan sekoituslohkosta.

Suoritustiedot


Tuotteen kertakäyttöisyys vähentää ristikontaminaation riskiä eri sovellusten tai potilaiden välillä verrattuna monikäyttöisiin tuotteisiin (esim. alumiini- tai lasilevyihin) ja säästää aikaa (monikäyttöisten tuotteiden puhdistaminen) hammashoitolassa.

Sileä, vettä ja rasvaa kestävä pinta estää komponenttien imeytymisen sekoituslohkoon. Moninkertainen mitoitus takaa suuren vakauden.

Huomautuksia tuotteen turvallisesta käytöstä*

- Lääkinnällistä laitetta saa käyttää vain (koulutettu) hammashoitohenkilökunta.
- Käytä käsineitä käytön aikana.
- Käytä uutta sekoitustyynyä jokaista käyttökertaa varten.
- Hävitä käytetty levy jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Sekoitustyyny ovat kertakäyttöisiä tuotteita. Jos tuotetta (yksittäistä levyä) käytetään useammin kuin kerran, voi esiintyä ristikontaminaatiota ja eri hammassementtien, komposiittien tai jäljennösmateriaalien sekoittumista. Tällöin sekoitetun materiaalin ominaisuuksia ei voida taata.
- Älä käytä vaurioitunutta tai saastunutta levyä.
- Säilytä tuotetta pimeässä ja kuivassa paikassa 5-35 °C:n lämpötilassa.

Kaikista tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja maanne toimivaltaiselle viranomaiselle.

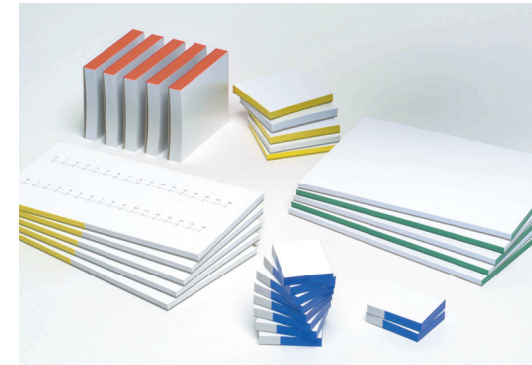

Luettelo MGK:n terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista. EU:n lääkitönnällisten laitteiden standardin DIN EN ISO 15223-1:2022-02 mukaisesti			
	Tutustu käyttöohjeisiin	REF	Luettelo- tai mallinumero
	Ei saa käyttää uudelleen	LOT	Eränumero
	Steriloimaton	MD	Lääkitönnällisellä laitteella
	Pidä auringonvalolta suojattuna	UDI	Yksilöllisellä laitetunnisteella
	Pidä kuivana		Lohkojen lukumäärä
	Viimeinen käyttöpäivä		Arkkien lukumäärä
	Säilytyslämpötila-alue	CE	CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä
	Valmistaja		

*Kirjallisuus: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene¹ - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

