

Kuvaus

Variolink® Esthetic Try-In -pastat ovat vesiliukoisia glyseriinipastoja. Try-In-pastojen avulla voidaan simuloida sellaisten täyskeraamisten restauroitioiden (laminaatit, inlayt, onlayt, kruunut ja sillat) värivaikutusta, jotka sementoidaan Variolink Esthetic -kiinnitysyhdistelmämuovilla.

Huomioi, että Try-In-pastojen väri ja läpikuultavuus vastaavat **kovettunutta (!)** Variolink Esthetic -kiinnitysyhdistelmämuovia.

Värit

Variolink Esthetic Try-In -pastoja on saatavana viitenä eri värinä:

Väri	Vaikutus
Light +	Vaaleampi / valkoisempi
Light	
Neutral	Väritön
Warm	
Warm +	Tummempi / kellertävämpi

Try-In-pastojen väri poikkeaa hieman vastaavan kovettumattoman kiinnitysyhdistelmämuovin väristä, sillä kiinnitysyhdistelmämuovin lopullinen väri nähdään vasta kovettumisen jälkeen.

Try-In-pastojen värivaikutus on sen vuoksi sovitettu samanpaksuisen täysin kovettuneen kiinnitysyhdistelmämuovin mukaan.

Koostumus

Variolink Esthetic Try-In -pastat sisältävät glyseriiniä, mineraalisia täyteaineita ja väriaineita.

Indikaatio

Pysyvän kiinnitysyhdistelmämuovin värin simulointi.

Vasta-aihe

Älä käytä Try-In-pastoja, jos potilaan tiedetään olevan allerginen jollekin materiaalin aineosista.

Haittavaikutukset

Hygrooskooppiset Try-In-pastat aiheuttavat nestevirtausta dentiinitubuluksissa, mikä saattaa aiheuttaa potilaalle tilapäisen epämiellyttävän tunteen. Tämän vuoksi Try-In-pastoja tulisi käyttää paikallispuudutuksessa tai kun alueen tuntoherkkyyttä on vähennetty vihlomisenestoaineella (esim. Telio® CS Desensitizer).

Yhteisvaikutukset

Huuhtelee kaikki Try-In-pastan jäämät restauroitiosta ja hampaasta vedellä ennen pysyvän sementin levittämistä. Muuten restauration ja Variolink Esthetic -aineen välinen sidos voi olla heikko.

Käyttö

- Värin simulointi Try-In-tahnoilla on tehtävä aina ennen työskentelyalueen eristämistä tai hampaiden kuivumista, sillä kuivuminen vaalentaa hammasrakennetta tilapäisesti.
- Levitä pieni määrä valittua Try-In-pastaa restauroitiin ja istuta se paikalleen varovasti ilman painetta. Jos restauroitio ei istu helposti paikalleen, tarkista, onko restauroitiin sisäpinnoilla ja proksimaalisilla alueilla ennenaikaisia kosketuksia. Älä istuta restauroitiota väkisin voimalla paikalleen (murtumisriski!).

Huomautus:

Hauraiden keraamirestauroitioiden purenta on tarkistettava hyvin varovasti tai vasta restauroitioiden pysyvän sementoinnin jälkeen murtumisriskin vuoksi.

- Try-In-pastat ovat vesiliukoisia ja ne voidaan helposti poistaa restauroitiosta juoksevalla vesijohtovedellä tai ultraäänipuhdistimilla. Varmista, että restauroitio puhdistetaan ja kuivataan perusteellisesti.
- Puhdista hammasrakenne perusteellisesti puustamalla vedellä.
- Sementoi sitten restauroitio Variolink Esthetic -aineella (katso Variolink Esthetic -aineen käyttöohjeet).

Käyttöikä ja säilytys

- Älä käytä Variolink Esthetic Try-In -pastoja viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Säilytyslämpötila: 2–28 °C.
- Viimeinen käyttöpäivämäärä: katso merkintä ruiskuissa ja pakkauksissa.

Säilytä lasten ulottumattomissa!**Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.**

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Materiaalia tulee käsitellä tarkasti käyttöohjeita noudattamalla. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttöohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteen soveltuvuuden testaaminen tai käyttäminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla. Kuvaukset ja tiedot eivät ole takuu ominaisuuksista eivätkä ole sitovia.