

Vaihe	Parametrit	Materiaalit
Manuaalinen esipuhdistus	Käytä varovasti pehmeää harjaa tai kosteaa liinaa poistaaksesi näkyvät roskat ja/tai jäljellä olevan gutta-perchan jokaisesta lämmittimestä, sähköisesti lämmitettävästä pluggerista ja Thermal Response -kärjestä.	–
Asettelu	Aseta komponentit kärjet alaspäin pienten osien siivilään.	–
Esipuhdistus	2 minuuttia, kylmä vesi	Vesijohtovesi
Puhdistus	10 minuuttia, 55 °C	Emäksinen liuos (Dr. Weigert Neodisher MediClean forte, 0,4 %) valmistettuna tislattuun veteen
Välivaiheen huuhtelu 1	1 minuutti, kylmä vesi	Vesijohtovesi
Välivaiheen huuhtelu 2	1 minuutti, kylmä vesi	Vesijohtovesi
Desinfiointi	A0 = 3000 @ 90 °C 5 minuutin ajan	Demineralisoitu vesi