



BIOFINNDENT

Vesilinjojen desinfiointi BioFinndent pesuaineella

Suorita vesilinjojen desinfiointi BioFinndentillä 1-2 kertaa viikossa poistaaksesi bakteerikalvon ja mineraalit. BioFinndent on valmista käytettäväksi sellaisenaan, laimennus tai sekoittaminen ei ole tarpeen.

Valmistelu:

Irrota kaikki käsi- ja kulmakappaleet, mikromoottorit, monitoimiruiskut jne. pesuohjelman ajaksi, jotta vedenvirtauksella ei ole esteitä.

Vaihe 1: Valmistele pesujärjestelmä

Täytä vesilinjojen pesujärjestelmän pullo tai pesujärjestelmä BioFinndentillä. BioFinndentä ei tarvitse laimentaa tai sekoittaa ennen käyttöä.

Mikäli käytettävissä on useita vesilähteitä, varmista että BioFinndent on valittu syöttöveden lähteeksi.

Vaihe 2: Täytä vesilinjat

BioFinndentin on oltava vesilinjoissa yön yli.

On suositeltavaa pestä sylkykupin viemäriletku BioFinndentillä.

Seuraa hammashoitokoneen ohjeita vesilinjojen puhdistamiseksi. Tavalliset menetelmät ovat:

- Valitse hammashoitokoneen vesilinjojen puhdistusohjelma syöttääksesi BioFinndentä vesilinjoihin.
- Juoksuta vettä jokaisen instrumentin läpi, kunnes BioFinndentä tulee instrumentista. Tämä tarkoittaa sitä, että vesilinjat ovat täynnä BioFinndentä.

Kaada noin 200 ml BioFinndentä Sylkykupin viemäriin. Älä huuhtelee tämän jälkeen.

Vaihe 3: Odota 12 tuntia

Anna BioFinndentin vaikuttaa vesilinjoissa ja sylkykupin viemäriputkessa 12 tuntia. Paras tulos saavutetaan kun pesuaineen annetaan olla aloillaan yön tai viikonlopun yli.

Vaihe 4: Huuhtelee 10 minuuttia

12 tunnin tai viikonlopun jälkeen huuhtelee vesilinjat puhtaalla vedellä 10 minuutin ajan.

Huuhtelee sylkykupin viemäri puhtaalla vedellä.

Tuotenumero 8600026 5L kanisteri

Tuotenumero 8600026-1 1L pullo



Parasta ennen päiväys on merkitty pulloon/kanisteriin.



Eränumero on merkitty pulloon/kanisteriin.

Jälleenmyyjä:  FINNDENT | Niittylänpolku 16 | 00620 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 743 5115 | www.finndent.com | info@finndent.com

Valmistaja:  ALPRO[®] MEDICAL GMBH | Mooswiesenstr. 9 | 78112 St. Georgen Germany
Tel. +49 7725 9392-0 | www.alpro-medical.com



DOC-1182-2355-fi