



## Uveneer®

SUORAN TEKNIIKAN YHDISTELMÄMUOVIMUOTTIJÄRJESTELMÄ



- Odotetut, korkealaatuiset, luonnollisennäköiset yhdistelmämuovirestaatiot
- Estää happi-inhibitiokerroksen muodostumisen kovettumisen aikana ja saa siten aikaan kovan ja kiiltävän pinnan
- Valo pystyy läpäisemään muotin yhdistelmämuoviin saakka tehokasta kovettumista varten
- Tehokas kaikkien yhdistelmämuovien kanssa
- Helppo irrottaa kovettuneesta yhdistelmämuoviresiinistä
- Vaatii vain vähän viimeistelyä tai kiillotusta lyhentäen hoitoaikaa
- Helppo levittää yksittäiseen hampaaseen tai useisiin hampaisiin
- Kustannustehokas valinta autoklavoitavuuden ja uudelleenkäytettävyyden ansiosta

Ainutlaatuisella mini-invasiivisella Uveneer suoran tekniikan yhdistelmämuovimuottijärjestelmällä tehdään täydellisiä suoran tekniikan yhdistelmämuovilaminaatteja, joiden muoto ja symmetria ovat odotusten mukaiset. Se jäljittelee luonnollista hammasta ja on tarkoitettu luomaan korkealaatuinen ja luonnollisen näköinen etualueen restaatio vain yhdellä käynnillä. Sitä voidaan käyttää myös kosmeettisiin parannuksiin, sävyn valintaan sekä väliaikaisrakenteena posliinilaminaattien valmistuksen aikana.

Uudelleenkäytettävät, autoklavoitavat muotit on suunniteltu jäljittelemään hampaiden anatomiaa esteettisen hammashoidon ja ”kultaisen leikkauksen” sääntöjen mukaan. Niissä huomioidaan ihanteellinen korkeuden ja leveyden välinen suhde sekä hampaiden ääriiviivat, välit ja keskiliinja.

Muottien tarkan anatomisen hampaita myötäilevän muodon ansiosta yhdistelmämuovin paksuus vaihtelee paikoittain. Yhdistelmämuovia on vähemmän inkisaalisella kolmanneksella ja lähempänä ienrajaa sekä enemmän labiaalipinnoilla. Koska tämän vaihtelevan paksuuden ansiosta saadaan aikaan erilaisia vaikutelmia ja sävyjä, useissa tapauksissa luonnollisen vaikutelman luomiseen tarvitaan vain yksi yhdistelmämuovin värisävy. Hammaslääkärin käyttämästä tekniikasta riippuen voidaan kuitenkin käyttää useita yhdistelmämuovisävyjä.



Ennen ja jälkeen.



Esteettinen täyte Mosaic-yhdistelmämuovisävyjen A4, A3, A2 ja A1 avulla hammaskaulasta inkisaalireunaan. Enamel White- ja Opaque White -sävyä inkisaalireunassa.



Nuori nainen ei kehtaa näyttää hampaitaan. Hampaan 22 implanttikruunu ei sopinut muihin hampaisiin. Hampaiden 12, 11 ja 21 hoito kesti 45 minuuttia. Vain vähäinen preparointi oli tarpeen. Potilas on onnellinen ja tyytyväinen tuloksiin.

– Sigal Jacobson



### UVKV3

### Uveneer-pakkaus

16 kpl ylä- ja alahammasrivin muotteja, M-koko  
16 kpl ylä- ja alahammasrivin muotteja, L-koko



M- ja L-koon malleissa on 2 ykköshampaiden, 2 kakköshampaiden, 2 kulmahampaiden ja 2 poskihampaiden muotteja sekä ylä- että alahampaisiin.