


# STRATA-G™

## Sektorimatriisijärjestelmä

Strata-G™-sektorimatriisijärjestelmä on suunniteltu kokonaan uudelleen ja tarjoaa nyt parhaan mahdollisen ratkaisun vaikeimpiinkin II-luokan haasteisiin.

SlickBands™  
Tofflemire-style

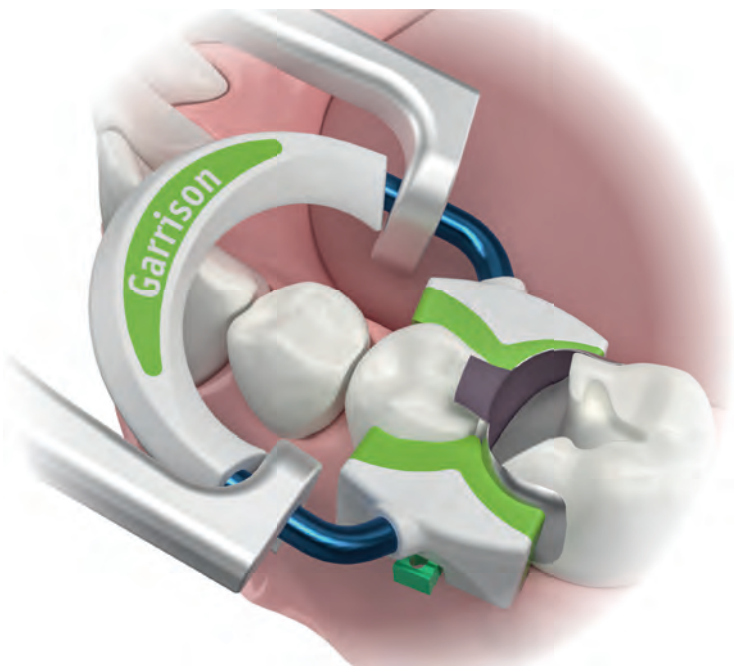

### Kliininen vinkki

- 1) Käytä reunankorotusnauhaa (ks. myös sivu 37) ensin, jotta saat kaviteetin reunan ienrajan yläpuolelle.
- 2) Poista sen jälkeen korotusnauha ja aseta muotoiltu Strata-G™-nauha.
- 3) Käytä sen jälkeen Strata-G™ -rengasta (SG600), jolla varmistat hyvän kontaktin myös laajoissa kaviteeteissa.



Tuote

Kuvaus

Lkm

SG600

Strata-G™ rengas,  
Vihreä, laajat preparaatiot

2/pakk

SMT500H10-M Margin Elevation Band

50/pakk

Garrisonin kehittämä tarttumaton tekniikka: uudenaikaiset sidosaineet saattavat tarttua kiinni pinnoittamattomiin matriiseihin – Slick Bands™ -matriisit irtoavat helposti.



### Reunaa korottava matriisinauha

Syvän marginaalireunan alueilla marginaalireunaa korottava matriisi mukautuu kaikkein parhaiten ikenen muotoon. Marginaalireunaa korottava matriisi on muotoiltu matalammaksi, jotta se sopii paremmin syvän marginaalireunan alueisiin.




### Right Curve™ -muotoilu:

Täysin uusien Right-Curve™ matriisinauhojen jyrkempi kaarevuus muodostaa erinomaisen gingivaalisen sulun ja ulottuu viereisiin hampaisiin helpottaen leveämpien ja syvempien kontaktien toteuttamisen. Hampaan ympärille kiedottuna nauha muodostaa huomattavasti jyrkemmän suppilomaisen kartion. Se on oikea valinta moniin restauroitioihin.


Ylettyä helpommin viereiseen hampaaseen, mikä mahdollistaa leveämpien ja syvempien kontaktien toteuttamisen.



Tiiviimpi gingivaalinen sulku on eduksi kaikissa restauroitioissa.

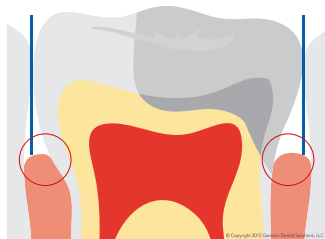

Tofflemire-tyyppiset matriisit

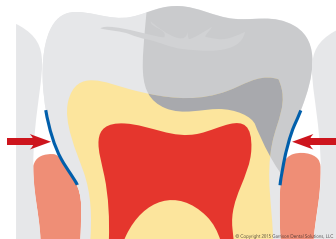

Reunaa korottava matriisinauha

## Slick Bands™

Tuote	Kuvaus	Lkm
SMT400D10-M	Right-Curve™ nauhat, vihreä	50/pakk
SMT400H10-M	Right-Curve™ nauhat, harmaa	50/pakk
SMT500H10-M	Margin Elevation Band	50/pakk



**SlickBands™**  
Tofflemire-style



*Klininen  
Tapaus*

Dr. Robert Rosenfeld (Westwood, New Jersey) käyttää Garrison Dental Solutions:n Margin Elevation Band -matriiseja.



**Kuva 1:** Amalgamin poisto; karies ulottuu syvälle subgingivaalisesti, sekä mesiaalises-  
ti että distaalisesti.



**Kuva 2:** Viedään primeriä ja sidosainetta, ja pieniä määriä täyteainetta.



**Kuva 3:** Margin Elevation Bandin ja kiilan käyttö.



**Kuva 4 & 5:** Margin Elevation Band poistetaan, asetetaan sektorimatriisinauha, kiila ja rengas mesiaalipuolelle.



**Kuva 6:** Valmis täyte.