

LIFE ♥ CLEAN

OHJE HAMMASLÄÄKETIEDE

Ihanteellinen ratkaisu

- Desinfioi pinnat erittäin tehokkaasti
- Ei uudelleen käsittelyn tarvetta
- Ei vaarallisia sivutuotteita
- Käsittelyaika 0,5-5 minuuttia
- Sopii monenlaisille materiaaleille
- Todistettu tehokkaaksi puolueettomissa kokeissa

Organismi	Käsittelyaika	Standardi
✓ Itiöt	2-5 min	EN 17126
✓ Mykobakteerit	1 min	EN 14563
✓ Virukset	30 s	EN 14476
✓ Hiiren norovirus	30 s	EN 14476
✓ SARS-CoV-2	30 s	EN 14476
✓ Sienet / hiivat	1 min	EN 13624
✓ Bakteerit	1 min	EN 13727

Täydelliset tiedot mikrobitehosta: Microbiological Efficacy Summary.



Ympäristöystävällisempi



- Kuormittaa ympäristöä n. 100 kertaa vähemmän (CO₂) kuin esim. alkoholipohjaiset desinfiointiaineet.
- Toksikologisissa testeissä todettu, että LifeClean ei ärsytä ihoa eikä silmiä eikä aiheuta syöpää tai kromosomivaurioita. Lisäksi se alittaa oraalisen toksisuuden raja-arvot.
- Luokiteltu turvalliseksi standardin EC 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
- Komponentit ovat biohajoavia eivätkä kerry luontoon. Ei muodosta kloorattuja sivutuotteita.

Biofilmi | Itiöt | Virukset | Sienet | Bakteerit

Täydelliset tiedot mikrobitehosta: Microbiological Efficacy Summary



LIFE ♥ CLEAN

OHJE HAMMASLÄÄKETIEDE

Käyttöohje pinoille:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Vain ammattikäyttöön. Noudata paikallisia ohjeita. Käytä suojakäsineitä. | 5 | Desinfioi pinta mekaanisesti pyyhkimällä. |
| 2 | Käytä tarvittaessa henkilösuojaimia*. | 6 | Anna LifeCleanin vaikuttaa halutun kontakti-/käyttöajan. |
| 3 | Poista kaikki näkyvä lika. | 7 | Merkitse etikettiin pakkauksen avauspäivä-määrä. Sulje avattu pullo. |
| 4 | Levitä runsaasti liuosta puhdistusliinaan. | | |


Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Henkilösuojaimet*

Suosittelemme asianmukaisen hengityssuojaimen käyttöä, jos ilmanvaihto on riittämätön tai altistuminen pitkittyy. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8.2.1.)



LifeClean-liuos:

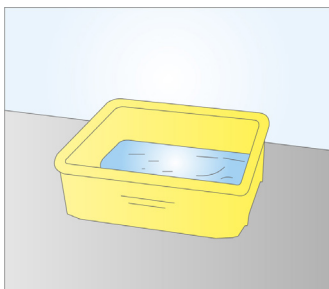


Laita haluttu määrä vettä astiaan.



Lisää haluttu määrä LifeCleania.




Poista kaikki näkyvä lika.

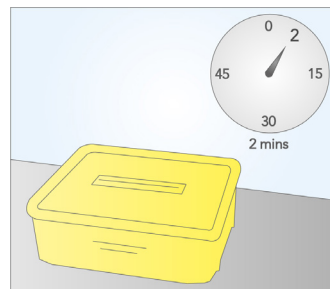

Laita puhdistettava esine astiaan. Anna vaikuttaa 2 min (virukset/bakteerit).



Huuhtele kohde. Noudata steriiliä vettä koskevia paikallisia määräyksiä.

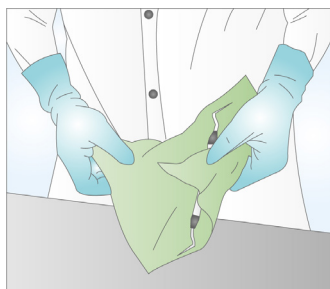

Kuivaa esine huolellisesti.

Laimennus:


Suosittelemme asianmukaisen hengityssuojaimen käyttöä laimennettaessa. LifeClean vaikuttaa ja tappaa mikrobeja niin kauan, kuin liuos on keltaista/vihreää. Tuotteen ja laimennoksen vahvuutta voidaan arvoida alla olevan värimittarin avulla.

400 PPM	200 PPM	50 PPM	10 PPM			
[—————]	Vahva	[—————]	Keskivahva	[—————]	Laimea	[—————]



Valmistettu Ruotsissa

©LifeClean International AB (www.lifeclean.se)
LC-ART-0431, versio 1.6.2022.
Kuvakkeet ja kuvat Freepik: www.flaticon.com

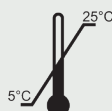

LIFE ♥ CLEAN
www.lifeclean.se