



PermaFlo™ Pink

JUOKSEVA YHDISTELMÄMUOVI



Micro 20 G Tip -kärki

- Erinomainen ratkaisu ikenien esteettiseen korvaushoitoon

PermaFlo Pink -yhdistelmämuovi on erinomainen vaihtoehto iensiirteelle, jota ei aina voida tehdä. Käytetään peiteaineena luokan V täyteissä, joissa juuren pinnan rakenne on paljastunut. Käytetään myös ienvetäymän peittämiseen.

Ennen ja jälkeen




1. Hampaan preparoinnin ja dentiinisidosaineen (suosittelemme Peak™ Universal Bond -sidosainetta) annostelun jälkeen tee täyte kerroksittain PermaFlo Pink -yhdistelmämuovilla.



2. Lopullinen täyte peittää paljastuneet juuren pinnat silloin, kun iensiirteen teko ei ole mahdollista.

963 PermaFlo Pink Mini -täyttöpakkaus
2 kpl 1,2 ml (2,30 g) -ruiskuja
4 kpl Micro 20 G -kärkiä

Säilytetään jääkaapissa.

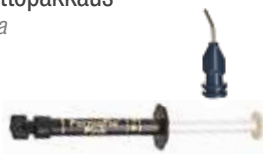

Composite Wetting Resin

KOSTUTUSRESIINI



Inspiral™ Brush -kärki

- Helpottaa yhdistelmämuovin täppäämistä
- Kostuttaa kuivan yhdistelmämuovin muotoilun aikana
- Hydrofobinen ja liuotinvapaa resiini

Composite Wetting Resin on 45 % fillereitä sisältävä valokovetteinen nestemäinen resiini. Se on huomattavasti parempi kuin yksikomponenttiset sidosaineet, jotka sisältävät liuottimia ja haittaavat polymeroitumista.

Composite Wetting Resiniä käytetään yhdistelmämuovimateriaalien kerrostamisessa. Suositellaan käytettäväksi silloin, kun happi-inhibiitokerros on poistettu tai häiriintynyt (esim. yhdistelmämuovin pinnan peseminen kontaminaation jälkeen). Composite Wetting Resin -resiiniä voidaan laittaa yhdistelmämuovin pinnalle, jos tämä on kuivunut muotoilemisen aikana. Käytä Composite Wetting Resin -resiiniä instrumentilla tai harjalla liukkaiden lisäämiseksi. Composite Wetting Resin helpottaa huomattavasti yhdistelmämuovitäyteen täppäämistä ja muotoilua.

3059 Composite Wetting Resin Mini -täyttöpakkaus
2 kpl 1,2 ml (1,85 g) -ruiskuja

Säilytetään jääkaapissa.

