



Eugenol

Reaktiivinen neste ZOE-sementin valmistukseen

Koostumus

Eugenoli 100 %

Ominaisuudet

Sekoitettuna sinkkioksidin kanssa se reagoi muodostaen hammaslääketieteessä käytettävän sinkkioksidi-eugenoli-sementin (ZOE-sementti).

Käyttöaiheet (ZOE-sementti)

- Väliaikainen obturaatio.
- Epäsuora pulpan peittäminen.

Käyttöohjeet

Sekoita sinkkioksidijauhe ja eugenoli keskenään suhteessa massa/neste (P/L) välillä 1,1-1,7 (g/g). Kovettuminen alkaa kosteuden läsnä ollessa. Kosteuden tai lämpötilan nousu nopeuttaa kovettumista. Kovettumisaika (testattu ISO 3107:n mukaisesti) on 6h50-16h käytetyn P/L-suhteen mukaan.

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä 5-30 °C:n lämpötilassa, suoralta valolta ja kosteudelta suojattuna. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen.

Varoitus

Eugenolin esiintymisen vuoksi vältä sementin käyttöä hartsipohjaisten täytteiden kanssa. Tätä tuotetta käytettäessä on käytettävä käsineitä ja suojalaseja. Ihokosketuksen sattuessa pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytystä ilmenee, pyydä lääkärin neuvoja/hoitoa. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelevä varovasti pehmeällä, puhtaalla vedellä 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet auki ja soita välittömästi lääkärille. Nielemisen sattuessa huuhtelevä suu vedellä, juo paljon vettä ja ota yhteys lääkäriin. Pidä altistunut henkilö levossa, älä pakota oksentamaan. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa tiedetään yliherkkyyttä jollekin näistä aineosista. Älä käytä, jos olet allerginen Eugenolille.

Pakkaus

	REF
15 ml:n pullo	11420
30 ml:n pullo	11421
100 ml:n pullo	11422



Hammaslääketieteen ammattilaiskäyttöön
Valmistettu Sveitsissä



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland