



Opalescence™ Boost™

TEHOVALKAISUAINE VASTAANOTOLLE 40 % VETYPEROKSIDI



Opalescence™ Boost™
Micro 20 G FX -kärki

- VALOA EI TARVITA!
- Tehokas 40-prosenttinen vetyperoksidigeeli
- Kaksi tai kolme 20 minuutin käyttökertaa, enimmäishoitoaika 40–60 minuuttia, enintään 3 applikointia yhdellä hoitokäynnillä
- Opalescence Boost -valkaisugeeli on suunniteltu tekemään hoidosta mahdollisimman miellyttävä potilaalle
- Tarkka annostelu
- Selkeästi näkyvä tuote on helppo poistaa kokonaan
- Sekoitus ruiskusta ruiskuun vastaanotolla takaa poikkeuksellisen vahvuuden
- Opalescence Boost -valkaisugeeli sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia
- Ei tarvitse säilyttää jääkaapissa

Lääketieteelliseen hampaiden valkaisuun, vastaanotolla hammaslääkärin tuolissa. Opalescence Boost on vaihtoehtoinen, perinteinen tummuneiden, sisältäpäin värjäytyneiden hampaiden hoitomenetelmä (verrattuna kruunuihin, laminaatteihin jne.). Värjäytymät ovat voineet syntyä sairauden, vamman tai lääkehoidon seurauksena, ja niiden syitä voivat olla esim. synnynnäiset, systeemiset, metaboliset, farmakologiset, traumaattiset tai hoitoperäiset tekijät kuten hammasfluorooosi, keltatauti, tetrasykliini ja aikuisilla minosykliini, porfyria, traumat ja vastasyntyneen hemolyyttinen tauti. Opalescence Boost -valmisteella hammaslääkäri hoitaa värjäytymiä hyvin kohdistetusti ja tehokkaasti.

Ennen ja jälkeen



Dr. Jörg Weiler

1. Ennen Opalescence™ Boost™ -valkaisuhoitoa.
20-vuotias mies, jonka hampaan 21 keskikohdassa on värjäymä. Valkaisuhoito aloitettiin oikomishoidon päätyttyä. Hampaan 21 etupuolen keskikohdassa on ruskeahko tahra.




2. Odota 20 minuuttia kunkin applikoinnin jälkeen.




3. Kahden 20-minuuttisen Opalescence™ Boost™ -valkaisuhoiton jälkeen.




Sekoitusohjeet

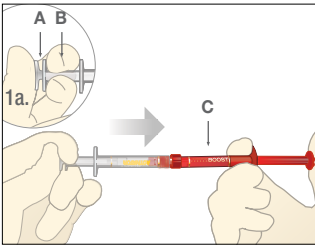

1. Varmista, että ruiskut ovat tiukasti kiinni toisissaan. Paina pieni kirkas mäntä (A) keskimmäiseen pieneen kirkkaaseen ruiskuun (B) rikkoen sisäkalvon ja yhdistäen siten valkaisuaineen ja aktivaattorin.

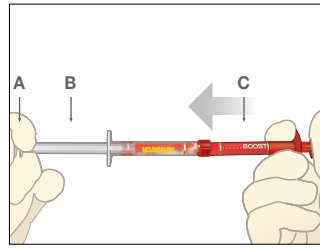

2. Paina punaisen ruiskun (C) mäntää sisään, jolloin koko sisältö työntyy kirkkaaseen ruiskuun (B).

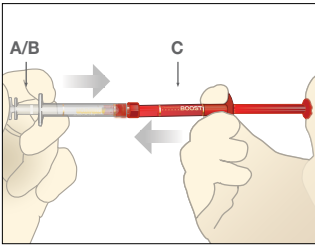

3. Paina sitten kirkas mäntä kokonaan takaisin punaiseen ruiskuun (C). Sekoita aktivaattori ja valkaisuaine perusteellisesti työntämällä ruiskua peukalolla edestakaisin vähintään 50 kertaa (25 kertaa kumpaankin suuntaan/puoleen).



4. Paina sekoitettu geeli kokonaan PUNAISEEN ruiskuun. Irrota ruiskut toisistaan ja kiinnitä punaiseen ruiskuun Micro 20 G FX™ -kärki. Ennen käyttöä suussa tarkista harsotaitoksen tai sekoitusastian päällä, että materiaali juoksee tasaisesti. Jos tunnet vastusta, kiinnitä uusi kärki ja testaa uudelleen ennen annostelua.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Sekoittamisen jälkeen Opalescence™ Boost™ säilyy jääkaapissa käyttökelpoisena 10 vuorokautta. Ennen ruiskujen hävittämistä täytä ruisku vedellä ja tyhjennä neste viemäriin. Toista muutama kerta ennen ruiskun hävittämistä. Huuhtele mahdollisesti käytetyt harsot vedellä.

VAROITUS:

Hammaslääkärin, hammashoitajan ja potilaan on käytettävä suojalaseja vastaanottokäyttöön tarkoitettua Opalescence Boost -valkaisuaineen sekoituksen ja applikoinnin aikana.

- 4750 Opalescence Boost PF 40 % -esittelypakkaus**
 4 kpl 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator -ruiskua
 2 kpl 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green -ruiskua
 2 kpl IsoBlock-purublokki
 2 kpl värisävykortti
 2 kpl Ultradent Luer -vakuumiadapterit
 2 kpl SST – kirurginen imukärki
 10 kpl Micro 20 G -kärkiä
 10 kpl Micro 20 G FX -kärkiä



- 4751 Opalescence Boost PF 40 % -potilaspakkaus**
 2 kpl 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator -ruiskua
 1 kpl 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green -ruisku
 1 kpl IsoBlock-purublokki
 1 kpl värisävykortti
 5 kpl Micro 20 G -kärkiä
 5 kpl Micro 20 G FX -kärkiä



- 4754 Opalescence Boost PF 40 % -säästötyttöpakkaus**
 20 kpl 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator -ruiskua

