

# Varios -ultraäänilaitteen huolto

NSK



## HOITOHUONE TOIMENPITEEN JÄLKEEN

### VARIOS-KÄSIKAPPALET, KÄRJET JA AVAIMET

1. Irrota kärki käsikappaleesta momenttiavaimella.
2. Jätä kärki kiinni momenttiavaimeen.
3. Toimita käsikappale ja kärjet momenttiavaimiin kiinnitettynä välinehuoltoon puhdistukseen ja sterilointiin.



### VESIJÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN JA BIOFILMIN MUODOSTUMISEN EHKÄISEMINEN

#### Päivittäinen toimenpide

1. Tyhjennä nestepullo päivän päätteeksi.
2. Käytä vesijärjestelmä/instrumenttiletku kuivaksi.

#### Viikottainen toimenpide BioFinndent-liuoksella

1. Tyhjennä nestepullo.
2. Lisää BioFinndent-liuos (30 ml) nestepulloon.
3. Käytä ilman ultraäänikäsikappaletta kunnes sininen neste tulee ulos instrumenttiletkun käsikappaleen puoleisesta päästä.
4. Jätä neste vaikuttamaan seuraavaan aamuun asti.
5. Seuraavana aamuna laita vettä nestepulloon ja tyhjäkäytä vedellä niin kauan, että sininen liuos on poistunut järjestelmästä.



Til.nro 8600026 BioFinndent, 5 l

# VÄLINEHUOLTO

## VARIOS-NESTEPULLOT

1. Irrota nestepullo valkoisesta kannesta.
2. Tarkista kannen kaksi mustaa o-rengasta ja vaihda ne tarvittaessa.
3. Desinfioidi nestepullo ja kansi lämpödesinfektorissa.
4. Kuivaa nestepullo ja kansi paineilmalla.
5. Kansi voidaan halutessa autoklavoida.

**Huom!** Nestepullo ei ole autoklavointikelpoinen.

**Huom!** Vaihda tarvittaessa kannen o-renkaat käsin, aina ilman instrumentteja.

Til.nro U424060	Varios 750/970 nestepullo, 350 ml
Til.nro U424062	Varios 750/970 nestepullo, 500 ml
Til.nro 0312090100	Varios 750-970 nestepullon o-rengas



## VARIOS-KÄRJET


### Ultraäänipesu

1. Momenttiavain ja kärki irrotetaan pesuun erikseen.
2. Laita kärjet ja momenttiavaimet eri dekanterilaseihin tai puhdistuskoreihin pesun ajaksi.
3. Kuivaa kärjet ja momenttiavaimet paineilmalla.
4. Kiinnitä kärjet takaisin momenttiavaimiin.
5. Pakkaa ja autoklavoi max 135 °C.

### Lämpödesinfointi

1. Momenttiavain ja kärki irrotetaan pesuun erikseen.
2. Laita kärjet ja momenttiavaimet niihin kuuluviin telineisiin pesun ajaksi.
3. Kuivaa kärjet ja momenttiavaimet paineilmalla.
4. Kiinnitä kärjet takaisin momenttiavaimiin.
5. Pakkaa ja autoklavoi max 135 °C.

**Noudata huolellisuutta kärkien puhdistamisessa. Kärjet eivät saa päästä vääntymään huoltotoimenpiteen aikana. Vääntynyt kärki on käyttökelvoton.**

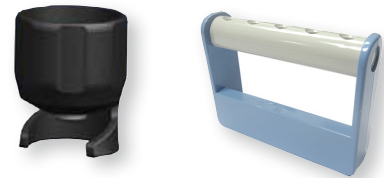

Til.nro Z221076	Varios momenttiavain suojattu
Til.nro Z221080	Varios kärkiteline

## VARIOS LUX JA VARIOS2 LUX -KÄSIKAPPALEET

1. Puhdista lämpödesinfektorissa.  
Pesuaine ei saa sisältää EDTA- ja NTA-yhdisteitä ja pH oltava neutraali.

**Huom!** Pyyhinnässä ei saa käyttää 1-propanoli- eikä peroksidipohjaisia tuotteita.

2. Kuivaa paineilmalla.
3. Pakkaa ja autoklavoi max 135 °C.



We'll back  
you up

# Varios -ultraäänilaitteen itsevaihdettavat varaosat

NSK

## VARIOS 750 LUX

### Tilausnumero Tuotenimi

E250050	NSK Varios 150, 350, 750 käsikappale, 1 kpl
U424061	NSK Varios 750 vesipumppu, 1 kpl
E250055	NSK Varios 750 lux instrumenttiletku, 1 kpl
E250205A	NSK Varios 150-750 lux valolettun ruuvi, 1 kpl
U424060	NSK Varios 750, 970 nestepullo 350 ml, 1 kpl
U424062	NSK Varios 750, 970 nestepullo 500 ml, 1 kpl
Y900107	NSK Varios halogenpolttimo, 1 kpl
E250075	NSK Varios 150, 350, 560, 750 lux sin. poltinsuoja, 1 kpl
Z1008001	NSK Varios pyöreä jalkakytin, 1 kpl



## VARIOS 970 LUX

### Tilausnumero Tuotenimi

E351050	NSK Varios 170, 570, 970 käsikappale, 1 kpl
10000643	NSK Varios 970 vesipumppu, 1 kpl
E351055	NSK Varios 970 lux instrumenttiletku, 1 kpl
U424060	NSK Varios 750, 970 nestepullo, 350 ml, 1 kpl
U424062	NSK Varios 750, 970 nestepullo, 500 ml, 1 kpl
Z1008001	NSK Varios pyöreä jalkakytin, 1 kpl



We'll back  
you up