



## OraSeal™

TIIVISTYSAINE JA PUTTY



Black Mini™ -kärki White Mac™ -kärki

- Kiinnittyy veden ja syljen vaikutuksesta
- Suojaa ientä peroksidilta ja fluorivetyhapolta
- Ihanteellinen sulkemaan vuodot jäljennöksiä otettaessa
- Kiinnittyy tehokkaasti kosteaan kofferdamkumiin, kudokseen, hampaisiin ja metalliin
- Putty-aine on Caulk-ainetta jäykempää eri kliinisten tarpeiden mukaan



OraSeal Caulking -ainetta pystyy sulkemaan kofferdamkumin vuodot jopa upotettuna nesteeseen. Annostellaan reunan ympäri ja sitten ristiin rastiin reiän päälle, kunnes sulku on valmis.

OraSeal Caulking -ainetta käytetään, kun riittävä tiiviys on vaikea saada aikaan. Sillä voidaan korjata myös kofferdamkumin vuotoja. Se tiivistää kofferdamkin tehtäessä posliinin korjausta ja suojattaessa ientä fluorivetyhapolta. Annostellaan allemenoihin, implanttipalkkien ja tarkkuuskiinnikkeiden alle jne., jotta kylmäakryyli jäljennösmateriaali ei pääsisi tukkimaan tyhjiä tiloja. Kiskojen ja siltojen ikenenpuoleiset kolot täytetään pysyvän sementoinnin ylimäärärien puhdistuksen helpottamiseksi. Käytetään myös implantin suprakonstruktion ruuvinreikien täyttöön ennen jäljennösten valmistusta. Jotkut käyttävät mieluummin jäykempää OraSeal Putty -ainetta, jonka ominaisuudet ovat muuten samat.

## Käyttö



OraSeal Caulking -ainetta annostellaan Black Mini -kärjellä tai White Mac -kärjellä kofferdamkin vuotamisen estämiseksi hoidon aikana.<sup>2</sup> Materiaali muotoillaan käsin kädessä kostealla sormella, kostealla harsotaitoksella tai instrumentilla. Toimenpide tehdään puhtaalla, kuivalla alueella.

## OraSeal-materiaalin käyttö



Varmista kofferdamkin tiiviys käytettäessä voimakasta peroksidia valkaisuun tai etsattaessa posliinia fluorivetyhapolla.



Proteettisen implanttiklipin alla ja ympärillä olevat allemenot tukitaan puttylla. Pinteen taipuisa osa peitetään puttylla pinteen taipumisen mukauttamiseksi jäljennöslusikan asettamisen ja poistamisen aikana.



Kosteuden hallinta pitää varmistaa sidostettaessa alahampaiden oikomisbraketteja. Sulje aukko tiivistysaineella tai puttylla estääksesi sylkeä tihkumasta aukkojen läpi ja kontaminoimasta aluetta.



Sulje laajat interproksimaalilitat, jolloin jäljennös irtoaa helposti ja vääristymättä.



Laita puttya kiinteiden osaproteesien tai implanttipalkkien alle ennen jäljennöksen ottoa.



Käytä puttya tukkimisaineena ennen kiinnikkeiden, pinteiden jne. ankkuroimista kylmäakryyliä.

352

### OraSeal-pakkaus

- 1 kpl 1,2 ml (1,28 g) OraSeal Caulking -ruisku
- 1 kpl 1,2 ml (1,44 g) OraSeal Putty -ruisku
- 4 kpl Black Mini -kärkiä
- 20 kpl White Mac -kärkiä



351

### OraSeal Caulking -täyttöpakkaus

- 4 kpl 1,2 ml (1,28 g) -ruiskuja

354

### OraSeal Caulking -säätötäyttöpakkaus

- 20 kpl 1,2 ml (1,28 g) -ruiskuja



353

### OraSeal Putty -täyttöpakkaus

- 4 kpl 1,2 ml (1,44 g) -ruiskuja

355

### OraSeal Putty -säätötäyttöpakkaus

- 20 kpl 1,2 ml (1,44 g) -ruiskuja

