

KÄYTTÖOHJE

KUVAUS: ASPIJECT® SIS on itse-aspiroiva sylinteriampulliruisku paikallispuudutusta varten.

YHTEENSOPIVUUS: ASPIJECT® SIS-järjestelmää käytetään tavallisen puudutusneulan ja vakiosylinteriampullin kanssa:

REF	Neula	Ampulli
2085	M6	1,8 ml
2090	7/32"	1,8 ml

Huomautus! Käytä muovikantaisia puudutusneuloja.

Vältä metallikantaisten neulojen käyttöä, koska ne voivat johtaa metallilastujen kertymiseen kierteisiin.

KÄYTTÖTARKOITUS: Infiltraatioon ja puudutukseen suuontelossa. Suunniteltu käytettäväksi steriileissä olosuhteissa.

KÄYTTÄJÄPROFILLI: Hammashoidon ammattilaiset, jotka on koulutettu suorittamaan paikallisia hammaspistoksia.

OHJEET: 1. Kiinnitä neula. Ei-steriili avustaja ruuvaa neulan kiinni, kun steriili kirurgi/avustaja pitelee ampullikammiota, kuva 1.

2. Lisää injektiopullo. Steriili avustaja/kirurgi pitelee steriiliä ampullikammiota, ja ei-steriili avustaja asettaa ei-steriilin ampullin, kuva 2.

3. Ruuvaa ampullikammio steriiliin sormikahvaan. Steriili kirurgi/avustaja ruuvaa ampullikammion steriiliin ASPIJECT® SIS -sormikahvaan. Ei-steriili avustaja poistaa neulansuojuksen, Kuva 3.

4. Aspiraatio saavutetaan painamalla mäntää kevyesti. Kun ampullin elastinen kalvo kimpoaa takaisin ampullikammion pohjassa olevasta pienestä levitteestä, ampulliin syntyy tyhjiö, joka takaa aspiratiosoinnin, Kuva 4.

PUHDISTUS: Puhdista ASPIJECT® SIS-sormikahva pesukoneessa yleisohjelmalla.

Puhdista patruuna käsin vesijohtoveden alla yleispuhdistusaineella. Huuhtelee vedellä. Vältä sylinteriampullin puhdistamista pesukoneessa.

Huomautus! Älä koskaan käytä liuotinpuhdistusainetta säiliön puhdistamiseen.

STERILOINTI: ASPIJECT® SIS toimitetaan ei-steriilinä, ja se on steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä. Steriloi autoklaavissa 134 °C:ssa vähintään 3 minuuttia. Sormikahva ja ampullikammio puretaan steriloinnin ajaksi (jos ruisku steriloidaan kasattuna, muovimateriaalin lämpölaajenemisen aiheuttamat jännitteet voivat aiheuttaa säiliön katkeamisen kierteisiin, kun sylinteri irrotetaan uudelleen).

AMPULLIKAMMIO: ASPIJECT® SIS:n mukana toimitetaan ampullisäiliö. Lisäsäiliöitä voi ostaa 3 kpl pakkauksissa.

SÄILYTYS: Säilytä kuivassa paikassa, likaantumiselta suojattuna.

HÄVITTÄMINEN: Hävitä ASPIJECT® SIS, jos laite on vaurioitunut tai jos laite on selvästi kulunut. Viimeisen käytön jälkeen hävitä ASPIJECT® SIS kierrätysastiassa puhtaissa olosuhteissa.

TAKUU: ASPIJECT® SIS:llä on 5 vuoden takuu. Takuu ei koske ampullikammiota. Takuu ei koske puutteellisen hoidon tai väärän käsittelyn aiheuttamia vaurioita.

TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ: 5 vuotta.