


FLEXIBLE SCALER

FLEXIBLE SCALER Art. 268

Kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu erittäin ohut perforoitu nauha. Perforoitu nauha toimii kuin käsi-instrumentti, joka poistaa tehokkaasti approksimaalisen hammaskiven, värjäymät sekä sementoinnin jälkeiset ylimäärät. Takaa tasaisen työskentelyjäljen.

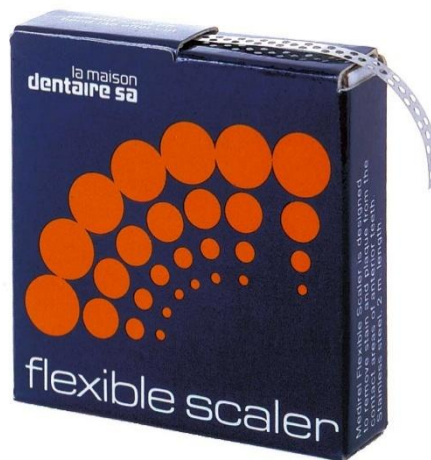

Käyttö

Leikkaa nauhasta tarvittava pituus. Aseta nauha approksimaaliväliin ja liikuta nauhaa kuten hiontasuikaletta. Ylijäämä sementtiä poistettaessa suositellaan liike aloittamaan posliinipinnalta kohti hammaskudosta. Vältä pehmytkudosten, kuten ikenien ja huulten vaurioittamista, sillä nauhan reunat ovat erittäin terävät. Kiinnitä huomiota myös työskennellessä lähellä juurenpintoja, koska liian voimakas instrumentointi voi poistaa juurisementtiä.

Emme suosittele tuotteen käyttöä yhdistelmämuovin kanssa.

Sterilointi

Voidaan steriloida millä tahansa menetelmällä. Voidaan käyttää uudelleen tai käyttää kertakäyttöisenä.

Pakkaus

Itseannosteleva rasia, kompakti ja taloudellinen ratkaisu.

Materiaali: ruostumaton teräs.

Pituus: 2 metriä.

Käyttöohjeet

Mikroskoopilla otetut valokuvat näyttävät perforointien perforaatioiden mikrometrinen rakenteen. Tämän teknologian ansiosta FLEXIBLE SCALER puhdistaa ja kiillottaa vahingoittamatta kiillettä.

