

3M Science.
Applied to Life.™

Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä



Tuotekuvaus

Sof-Lex™ kiillotusjärjestelmä on kaksivaiheinen, monikäyttöinen kiillotusjärjestelmä. Aikaisemmat laikat sopivat samaan kehränvarteen mihin Sof-Lex™ viimeistely- ja kiillotuskiekotkin. Laikat on valmistettu termoplastisesta elastomeerista, johon on impregnoitu synteettisiä timantteja ja alumiinioksidihukkasia.

Laikan muoto mahdollistaa käytön kaikilla hammaspinnoilla, jolloin et tarvitse useita eri muotoisia kiillotusvälineitä (esim. kärkiä, kuppeja, kiekkoja ja harjoja), jotka on suunniteltu vain tietyn tyyppisten pintojen kiillotukseen.

Yksi muoto

- Sopii kaikille hammaspinnoille
- Toimii kaikista suunnista
- Sopii etu- ja taka-alueelle
- Luonnollinen kiilto vain kahdella työvaiheella

Indikaatiot

Sof-Lex™ esikiillotuslaikka (beige) on indikoitu valmistelemaan kiillotettava pinta loppukiillotusta varten. Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka (pinkki) on indikoitu loppukiillotukseen. Laikoilla voidaan kiillottaa:


Suorat:

- Yhdistelmämuovitäytteet
- Muovivahvisteiset lasi-ionomeerit
- Bis-akryyliset väliaikaiset työt


Epäsuorat:

- Yhdistelmämuovit
- CAD/CAM -hybridimateriaalit
- Jalot ja epäjalot metallit

Molempia laikkoja käytetään alhaisilla nopeuksilla 15,000–20,000 r/min. Kiillotettava pinta kannattaa pitää kosteana. Lasimainen kiilto saavutetaan näin nopeammin kuin ilman vettä kiillotettaessa.

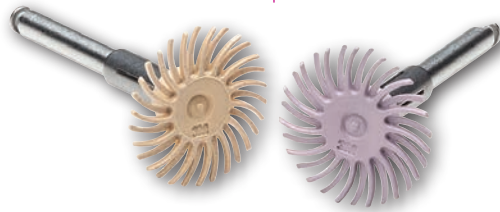


Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä

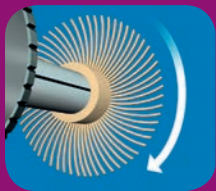

15.000 - 20.000
kierrosta/min.

Sof-Lex™ esikiillotuslaikka

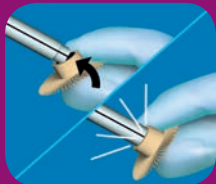


a.



b.

Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka

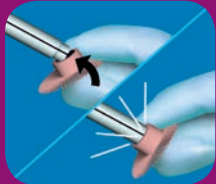

a.



b.



Okklusaali



Bukkaali



Linguaali taka-alue



Linguaali etualue



Labiaali



Approksimaali

Yleinen toimenpide

Sopivat tuotteet viimeistelyyn ja kiillotukseen alusta loppuun.

Sof-Lex™ kiillotusjärjestelmä on värikoodattu tummasta (karkea) vaaleaan (erittäin hieno), jonka ansiosta työskentely on helppoa. Pop-On -kiinnitys helpottaa vaihtoja kiekkojen ja laikkojen välillä, jotta voit tehokkaasti edetä läpi viimeistely- ja kiillotustyövaiheen.

Ylimäärien poisto

Loppukiillotus



Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä: Unohda sotkuiset kiillotuspastat. 3M esikiillotuslaikka valmistelee täytteen pinnan loppukiillotusta varten, jonka jälkeen timanteilla impregnoitu laikka antaa täytteelle lopullisen kiillon.

Esikiillotus



Loppukiillotus



Ylimäärien poisto

Loppukiillotus




Sof-Lex™ kiekot: joustavat kiekot, jotka mukautuvat hampaan pinnan muotoihin.

Ylimäärien poisto



C

Muotoilu

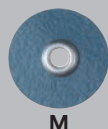


M

Viimeistely



F

Kiillotus

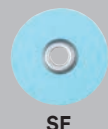

SF

Loppukiillotus




Sof-Lex™ XT kiekot: erikoisohuet kiekot, joilla pääsee helpommin approksimaaliväleihin

Ylimäärien poisto



C

Muotoilu

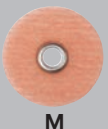

M

Viimeistely



F

Kiillotus



SF

Ylimäärien poisto

Loppukiillotus

Sof-Lex™ viimeistely-nauhat: eri karkeudet molemmissa päissä, sekä sileä keskiosa joka helpottaa hampaiden väliin pääsyä.


Ylimäärienpoisto & muotoilu



C

M

Ylimäärienpoisto & muotoilu

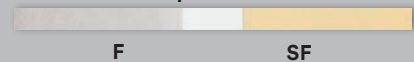

F


SF



Tilausno.	Sisältö
50921	Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä—peruspakkaus 5 kpl Sof-Lex™ esikiillotuslaikkaa (beige); 5 kpl Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki); käyttöohjeet; kuvallinen tekniikkaohjekortti
5090	Sof-Lex™ esikiillotuslaikka—refilli 15 kpl Sof-Lex esikiillotuslaikkaa (beige)
5091	Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka—refilli 15 kpl Sof-Lex Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki)

Sof-Lex™ muotoilu ja kiillotuskiekot


Sof-Lex™ muotoilu ja kiillotuskiekot refillit sis. 85 kpl kiekkoja

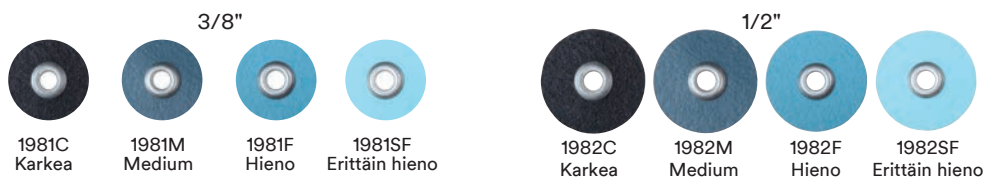

2380 Sof-Lex™ XT (erikoisohuet) viimeistely- ja kiillotuskiekot - aloituspakkaus, joka sisältää 30 kpl kiekkoja halkaisijaltaan; ø 9.5 mm ja ø 12.7 mm sekä karkeudeltaan; karkea, medium, hieno ja erittäin hieno
1 kpl RA kehränvarsia

Sof-Lex™ XT (erikoisohuet) viimeistely- ja kiillotuskiekot

Refillit sis. 85 kpl kiekkoja

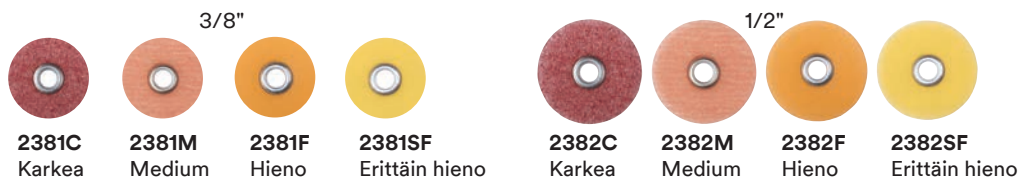

Sof-Lex™ viimeistelynauharefillit

1954 - 4 mm	Läpikuultava	Karkea/Medium 150 kpl nauhoja
1954N - 4mm	Läpikuultava	Karkea/Medium—kapea 100 kpl nauhoja
1956 - 4 mm	Keltainen	Hieno/Erittäin hieno 120 kpl nauhoja

Kehranvarret

1983RA 3 kpl RA kehränvartta (kulmakappaleeseen)

1983HP 3 kpl HP kehränvartta (suoraan käsikappaleeseen)

1983FG 3 kpl FG kehränvartta (turbiini kiinnityksellä)

