


Varios Combi Pro2

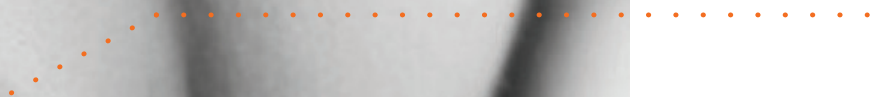

NSK





32

syytä hankkia **Varios Combi Pro2**

Kuunneltuamme laajasti ammattilaisia, kehitimme yhdistelmä-laitteen, joka tarjoaa useita edistyksellisiä ominaisuuksia.

Varios Combi Pro2 yhdistää ultraäänen, supragingivaalisen ja subgingivaalisen jauhepuhdistuksen. Yksinkertaista helppo-käyttöisyyttä, joka mukautuu kaikkiin hoitotyyliin.

NSK:n laajan kokemuksen ja tutkimuksen pohjalta syntynyt Varios Combi Pro2 tarjoaa ammattimaista hoitoa, jota NSK:lta on totuttu odottamaan. Kestävyys sekä vaivaton huollettavuus tekevät siitä täydellisen laitteen päivittäiseen työhön. Rutiinin-omaiset hoitotoimenpiteet saadaan suoritettua sujuvasti ja tehokkaasti ilman keskeytyksiä.

NSK tarjoaa edistykselliset laitteet huippusuorituksen varmistamiseksi, jokaista hoitokertaa varten.

ULTRAÄÄNI

Helposti irrotettava vesisäiliö

Helposti irrotettava ja kiinnitettävä



Titaaninen ohut käsikappale

Valmistettu titaanista. DURAGRIP-pinnoite tarjoaa erinomaisen tuntu-
taotteen, tasapainon. Käsikappaleen TWINLED valojärjestelmässä
yhdistyy paras valoteho 32000 lx, erinomaisella näkyvyydellä.



Veden säätö

Analogisella säätimellä veden määrän
hallinta on tarkkaa ja helppolukuista
(Ultraäänelle ja jauhepuhdistimille erilliset
säätimet).



Veden lämmitys

Sekä ultraääni ja jauhepuhdistin käyttävät lämmitettyä vettä.
Hoitotoimenpiteet ovat potilaalle miellyttävämpiä.

TÄYDELLISTÄ

JAUHEPUHDISTIN



Erilliset jauhepuhdistinyksiköt

Suunniteltu erillisiksi itse keskusyksiköstä toimintavarmuuden ja hoitoturvallisuuden takaamiseksi. Helppo huollettavuus varmistaa kestävyyttä sekä sujuvoittaa keskeytyksettömän päivittäisen työnkulun.



Perio-kärkisuutin

Käsikappaleen perio-kärkisuutin mahdollistaa tarkan ja kohdennetun hoidon ientaskuihin sekä ienrajojen yläpuolille.



Käsikappale

Pienikokoinen kärkeä kohden kapeneva käsikappale mahdollistaa paremman pääsyn vaikeimmin kohdistettaville alueille.



Intuitiivinen all-in-one kosketusnäyttö

Näyttää vain kulloinkin valikoituun hoitotoimenpiteeseen liittyvät toiminnot.

KÄYTETTÄVYYTTÄ



NSK Varios2 Lux

ULTRAÄÄNI

Ultraääni


Tehty kestäämään, miellyttäväksi käyttää.

Ilman kompromisseja NSK-laadusta. Titaaninen ultraääni- käsikappale tarjoaa erinomaista käyttömukavuutta, helppokäyttöisyyttä, ulottuvuutta sekä näkyvyyttä pitkäkestoisemman käyttöiän lisäksi.

Varios Combi Pro2 on varustettu ultraäänikäsikappaleella, joka on valmistettu lämpökäsitellystä titaanista. Se kestää paremmin lämpöä, kemikaaleja ja toistuvaa puhdistusta ja autoklaavisterilointia. Materiaali on allergiavapaa.

Hyvän otteen ja tasapainon varmistamiseksi käsikappaleessa on käytetty arvostettua DURAGRIP-otepinnoitetta, joka löytyy muista NSK premium Z-sarjan instrumenteista.

Muoto, kestävyys, tasapaino, keveys tekevät käsikappaleesta miellyttävän käyttää tarjoten pitkäkestoisen suorituskyvyn

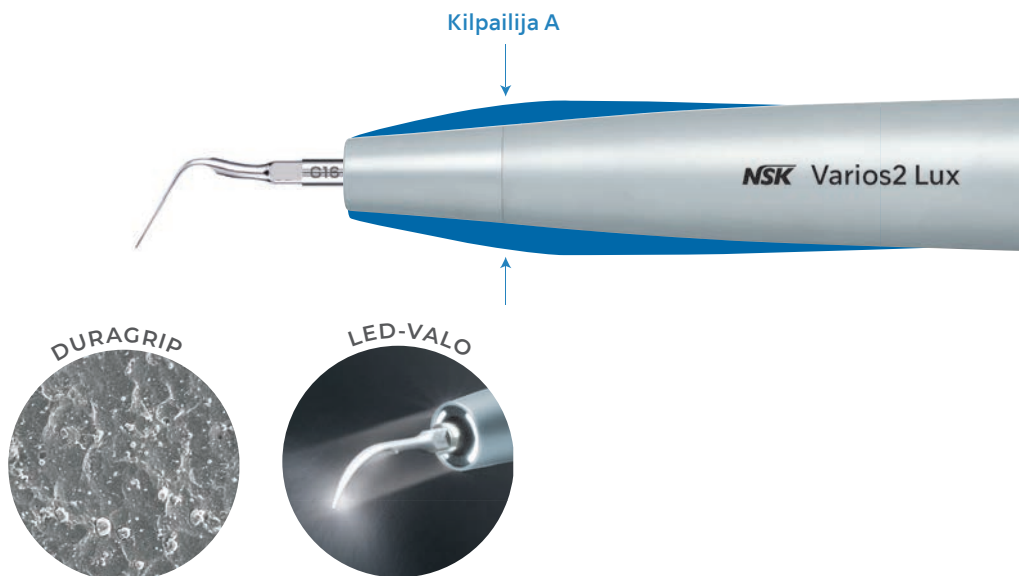




**JAUHE-
PUHDISTUS**

Jauhepuhdistus


Kapeat, vaihdettavat käsikappaleen kärkisuuttimet helpottavat työtä ja lisäävät tehokkuutta.

- Molaari-alueille pääsy on helpompaa pitkien, kapeiden kärkisuuttimien ansiosta.
- Kapeiden käsikappaleiden ja niiden kärkisuuttimien ansiosta saadaan parempi näkyvyys ja liikkumavara.
- Laaja työskentelyalue voidaan varmistaa linguaalisella puolella ilman, että huulia tarvitsee avata tarpeettoman leveästi bukkalisella puolella.
- Käsikappaleen kärkisuuttimet ovat helposti vaihdettavissa, mikä tekee puhdistuksesta ja huollosta ja korjauksista vaivatonta.

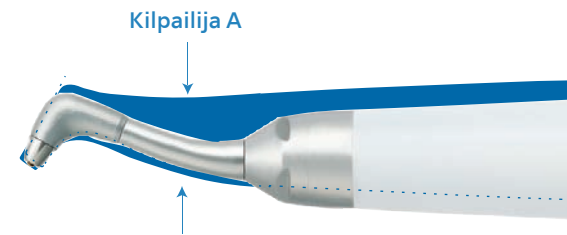


Jet-kärkisuutin

Uusi perio-käsikappaleeseen liitettävä JET-kärkisuutin soveltuu supragingivaalisiin hoitoihin. Aikaisemman perio-kärkisuuttimen lisäksi on JET-suuttimella mahdollista kohdistaa hoito tarkemmin oikeaan alueeseen. Näitä kahta perio-kärkisuutinta voidaan vaihdella halutun käyttötarkoituksen mukaan.

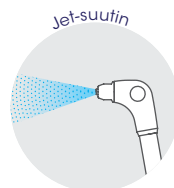

perio-käsikappaleelle

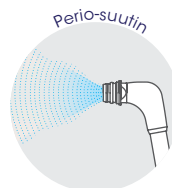

perio-käsikappaleelle




prophy-käsikappaleelle

Käyttövalmius



Erilliset supra- ja subgingivaaliset jauhepuhdistinyksiköt

Varios Combi Pro2 laitteessa jauhesäiliö, käsikappaleen letku ja käsikappale ovat erillään keskusyksiköstä. Puhdistaminen on tehty helpoksi kaikissa tilanteissa. Koko laitteen huoltoon lähettämiset on minimoitu laitteen edistyskellisen rakenteen ansiosta. Varios Combi Pro2 on suunniteltu toimimaan ilman keskeytyksiä.

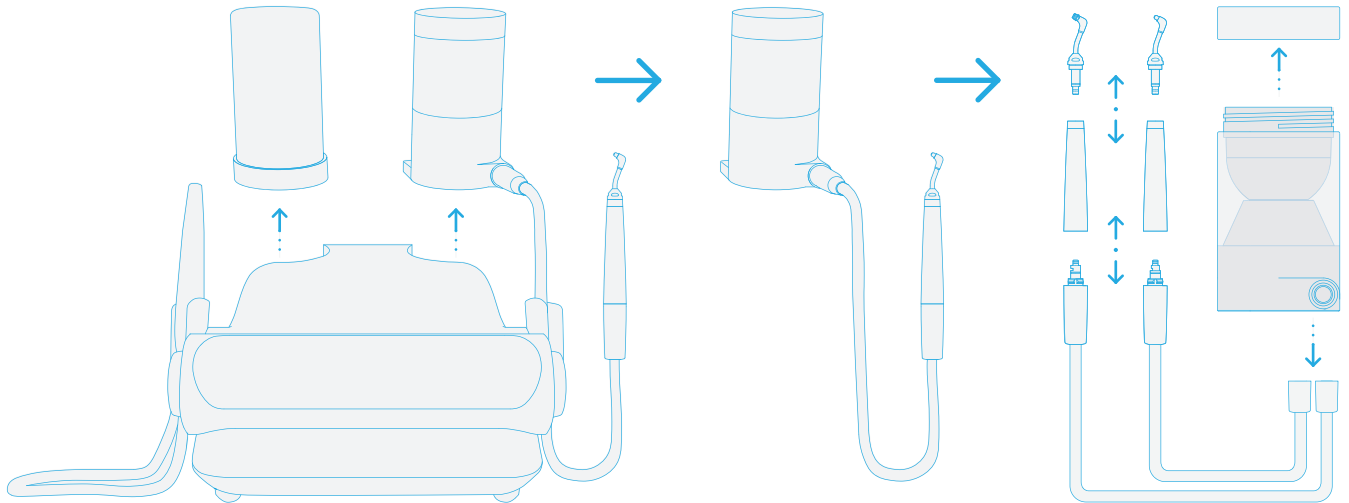

Keskusyksikön sisäinen rakenne perustuu älykkääseen konseptiin.



Määräaikaishuolto

Koska Varios Combi Pro2 ylläpito on käyttäjälle helppoa, säännöllistä huoltoa ei välttämättä laitteen toimittajalta tarvita. Vastaanoton käyttökätkot voivat olla historiaa. Kysy lisää jälleenmyyjältä.

Helppohoitoinen

Puhdistaminen, ylläpito

Varios Combi Pro2 sisältää neljä automaattista puhdistustilaa, joita voidaan käyttää tarpeen mukaan potilasvaihdon yhteydessä ja päivän päätteeksi. Nämä toiminnot pitävät laitteen toimintakuntoisena.



Jauhepuhdistin
AC P -ilmalinja



Jauhepuhdistin
AC W -vesilinja



Ultraääni
AC W -vesilinja



Jauhepuhdistin - ultraääni
AC D -ilmalinja-vesilinja



CLM-toiminto

Laitteen sisäisen vesilinjaston puhdistus on yksinkertaista b.clean- puhdistusliuoksen ja CLM- tilan avulla. NSK Varios Combi Pro2 on eurooppalaisten uudelleen käsittelyvaatimusten mukainen. NSK Varios Combi Pro sisältää sisäisen turvamekanismin, jolla estetään laitteen käyttö, kunnes kemiallinen liuos on kokonaan poistettu.



Potilasmukavuus

Vedenlämmitysjärjestelmä

Varios Combi Pro2 on varustettu sisäisellä vesilinjaston lämmittimellä. Sekä ultraääni että jauhepuhdistimien vesi on lämmitettyä. Veden lämpötila vastaa suun lämpötilaa joka tarjoaa potilaalle mukavampaa hoitokokemusta, myös herkkyydestä kärsiville.



Käytettävyys

Langaton jalkaohjain

Ei käyttöä rajoittavia johtoja. Helpompaa optimaalista käytettävyttä. Varios Combi Pro2 jalkaohjain yhdistyy Bluetoothin avulla keskusyksikköön. Jalkaohjain sisältää kaikki tarvittavat toiminnot sujuvat käytettävyyden takaamiseksi.



iCart Prophy2 nestesäiliöllä*

Erikoisvalmisteinen laiteteline tuo uuden ulottuvuuden käyttäjävällisyyteen ja käyttömukavuuteen.


Laite voidaan varustaa itsenäisellä vesisyöttöjärjestelmällä, joten Varios Combi Pro2:n yhdistäminen iCart Prophy2 -laitetelineeseen mahdollistaa potilaiden hoitamisen ympäristössä, jossa veden saatavuus tai laatu on haaste.



* Vesipullosarja saatavana lisävarusteena

NSK Ultraäänikärjet

Yli 70 erilaisen ultraäänikärjen valikoimamme ansiosta laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin kliinisiin käyttötarkoituksiin – sekä ennaltaehkäisevään hoitoon että hammasongelmien hoitoon.

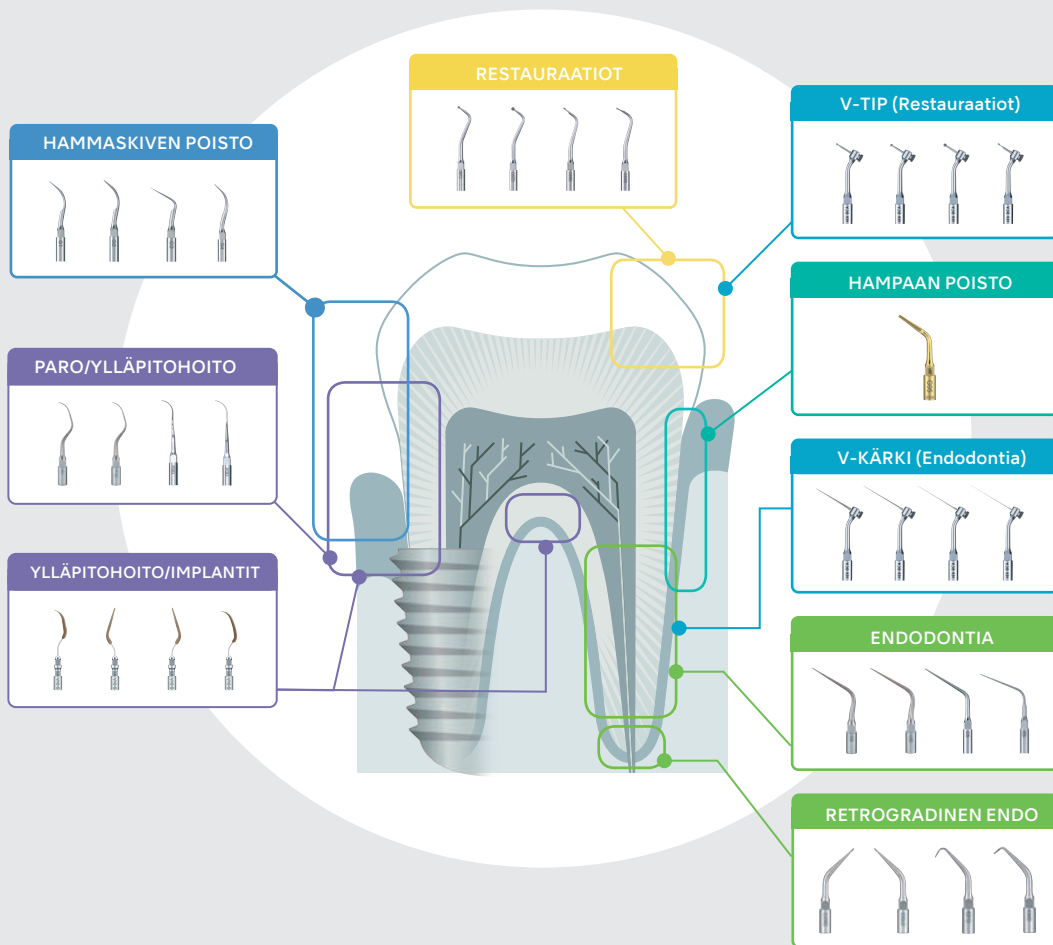

Skannaa
ja lataa
Tip Guide

Linkki: www.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/oral-varios_ultrascaler_tips/



PUHDISTUSJAUHEET

NSK Puhdistusjauheet

Kauniiden ja terveiden hampaiden ylläpito

Jauhepuhdistus poistaa tehokkaasti supra- ja subgingivaaliset värjäymät sekä biofilmin. Hyödyntämällä Varios Combi Pro 2 -laitteen etuja ja hoitoprotokollia voit avata oven uudenlaiseen ammattilaihoidon aikakauteen – saatuttaen poikkeuksellisia tuloksia. Huoletonta sinulle ja potilaillesi.

FLASH Pearl

Supragingivaalinen puhdistusjauhe, jonka pallomaiset hiukkaset ovat hellävaraisia kiilteelle.

Käyttötarkoitus: pinttyneiden värjäytymien poisto.

Pääainesosa: Kalsiumkarbonaatti

- Ei sisällä natriumkloridia (ei suolaista makua)
- Sopii potilaille, joiden natriumin saantia rajoitettu

Keskimääräinen partikkelikoko: 54 µm



MALLI	TIL.NRO
 FLASH Pearl 300 g pullo x 4	Y900698

SOFT Pearl

Supragingivaalinen puhdistusjauhe alhaisella hankaavuudella. Sopii rajoitetusti myös protetiikalle.

Käyttötarkoitus: biofilmin ja kohtalaisten värjäytymien poisto

Pääainesosa: Glysiini

- Ei lisättyjä aromeja
- Makea maku

Keskimääräinen partikkelikoko: 54 µm



MALLI	TIL.NRO
 SOFT Pearl 250 g pullo x 4	Y1500721

Perio-Mate

Puhdistusjauhe gingivaaliseen ja subgingivaaliseen käyttöön.

Käyttötarkoitus: biofilmin ja kohtalaisten värjäytymien poisto

Pääainesosa: Glysiini

- Ei lisättyjä aromeja
- Makea maku
- Erittäin vesiliukoinen, ei kerry elimistöön edes gingivaalisesti käytettynä






Keskimääräinen partikkelikoko: 25 µm



MALLI	TIL.NRO
 Perio-Mate puhdistusjauhe 160 g pullo x 2	Y900938

Jauhepuhdistus

Jauhe + kärkisuuttimet & käyttötarkoitukset

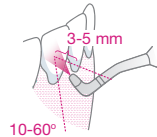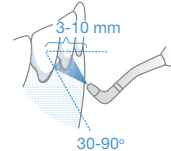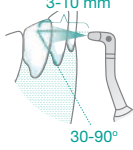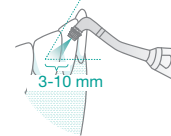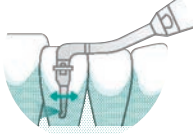TILA	POWDER KIT	KÄSIKAPPALE	SUUTIN	KÄYTTÖ	JAUHE
PROPHY MODE 	PROPHY 				
					
	PERIO 				
					
PERIO MODE 					

MIT

Minimaalisesti invasiivinen hoito

Varios Combi Pro2 auttaa suoriutumaan toimenpiteistä parhaalla mahdollisella tavalla
Suorita MIT-protokollan vaiheet 1, 2 ja 4 käyttäen ultraääntä ja jauhepuhdistusta supra-
ja subgingivaaliseen hoitoon.



NSK on sitoutunut laadukkaaseen suun terveydenhoitoon ja kehittää intuitiivisia, päivittäiseen käyttöön sopivia hammashoitotuotteita.

Varios Combi Pro2

Peruspaketti



VALOLLINEN	MALLI	TIL.NRO
●	Varios Combi Pro2 Basic Set	Y1500505

- Sisältää:**
 - Varios Combi Pro2 ohjausyksikkö
 - VA2-LUX-HP Ti
 - VA2-LUX-SC Ti
 - Prophy-kammio2
 - Prophy-instrumenttiiletku2
 - Jauhepuhdistus-käsikappale (Prophy)
 - Langaton jalkakytkin
 - Teline
 - Ilmaletku
 - Vesiletku
 - HuuhTELUPULLOSARJA
 - CLM-pullosarja
 - Ultraäänikärjet G8, G16 ja P20
- Tekniset tiedot:**
 - Mitat: L 249 x S 290 x K 115 mm (sisältää säiliöt)
 - Paino: 3,5 kg
 - Syöttöjännite: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
 - Käyttötaajuus (ultraääni): 28 - 32 kHz
 - Maksimiteho (ultraääni): 11 W

Saatavana erikseen



MALLI	TIL.NRO
Prophy Kit2	Y1500469

- Sisältää:**
- Prophy-kammio2
 - Prophy-letku2
 - Jauhepuhdistus-käsikappale (Prophy)
 - FLASH pearl puhdistusjauhe (300 g)
- * Sisältyy Varios Combi Pro2 peruspakettiin.



MALLI	TIL.NRO
Perio Kit2	Y1500470

- Sisältää:**
- Perio-kammio2
 - Perio-letku2
 - Jauhepuhdistus-käsikappale (Perio)
 - Perio Nozzle suutin 40 kpl
 - Perio Mate Nozzle kärjen vaihtoavain
 - Perio Mate puhdistusjauhe (160 g)

Lisätarvikkeet

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Varios Combi Pro2 laiteteline pyörillä Korkeus: 840 mm Paino: 16 kg		S9098

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
VA2-LUX-HP Ti		EA1203X050

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
B.clean (1 l pullo x 6)		BCL600

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Vesipullosarja Sisältää: • Irrigation Bottle Set • CLM pullosarja • Huoltotyökalu		Y1500719

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Varios Combi Pro Prophy-käsikappale		T1074001

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
CLM Module Set Sisältää: • CLM Perio-liitin • CLM Prophy-liitin		Y1500740

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Varios Combi Pro Perio-käsikappale		T1077001

Varaosat

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Prophy-käsi- kappaleen kärkisuutin		T1074012

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
HuuhTELUpullosarja (for Water Bottle kit)		ZA16160001

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Perio-käsi- kappaleen kärkisuutin		T1077012

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
CLM pullosarja (for Water Bottle Kit)		ZA16240001

MALLI	TUOTE	TIL.NRO
Jet-kärkisuutin (Perio-käyttöön)		TA10770106


Voidaan puhdistaa
lämpödesinfektorissa


Autoklavoitava

Create it 

www.nsk-dental.com

UNIDENT OY
Puh. 020 177 2300
info@unident.fi

Atomitie 5, 3. krs
00370 Helsinki
www.unident.fi

*We'll back
you up*
 **UNIDENT®**