



## Implanttikärkien käyttöohje

### V10-kärkiadapteri

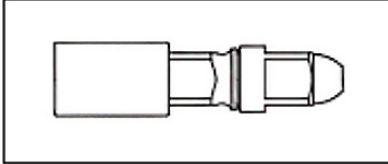


### Implanttikärki

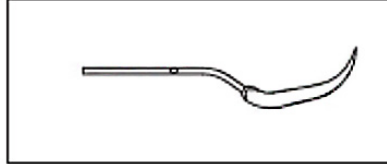

1. Kiinnitä kärkiadapteri V10 Varios-käsikappaleeseen käyttäen E-kärkiavainta.

Kierrä kärkiadapteri kiinni käsikappaleeseen kärkiadapterin alemmasta kiristysruuvista.

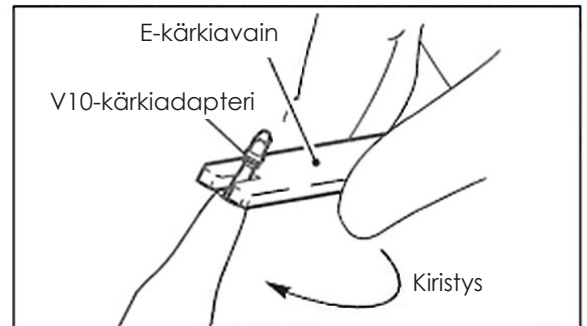


2. Aseta implanttikärki implanttiaadapteriin seuraavasti:

- Liitä Varios-käsikappale instrumenttiletkuun.
- Paina implanttikärki kevyesti kiinni implanttiaadapteriin siten, että implanttikärjen kohdistuslovi napsahtaa kiinni implanttiaadapteriin.
- Aseta aina implanttikärki implanttiaadapteriin käsikappaleen suuntaisesti.


**Huom!** Vältä liiallista voimaa.

Jos implanttikärki on painettu väkisin implanttiaadapteriin, kärjen kohdistuslovi puristuu kasaan terää kiristettäessä

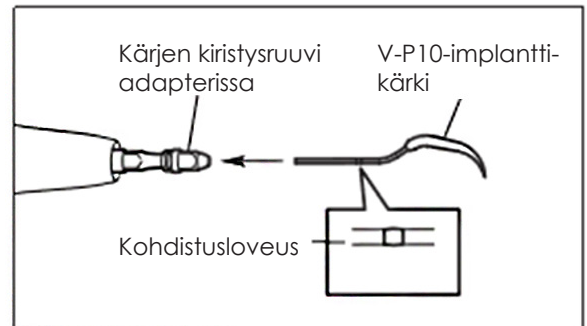


3. Kiristä implanttikärki kiinni momenttiavaimella. Terä on lukittu, kun momenttiavain napsahtaa. Varmista implanttiaadapterin ja implanttikärjen kireys E-avaimella kääntäen kärkiadapterin kiristysruuvissa olevista lovista. Löysälle jääneet kiinnitykset vaikuttavat tehoon.

Tarkista lopuksi, että implanttikärki ei luista implanttiaadapterissa.

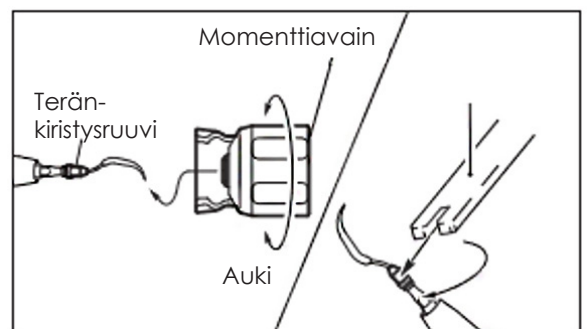

4. Säädä vedensyötön teho laitteesta ennen käyttöä niin, että vesisuihku pirskoutuu aivan kärjen päästä.

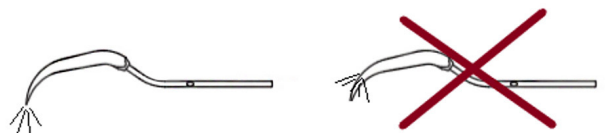

## 5. Tehoalueiden käyttö

Varmista käsikappaleen/laitteen malli.

**Käyttöohjeessa ilmoitettua maksimitehoa ei pidä ylittää.**

<b>Varios2</b> Varios 970 570/370	<b>Varios</b> Varios 750 550/560/350
P ⑥	P ③

Toimenpide on hyvä aloittaa matalammalla teholla ja nostaa tehoa tarpeen mukaan siten, että implanttikärjelle osoitettua maksimitehoa ei ylitetä. Tehon ylitys voi vaurioittaa kärkeä tai käsikappaletta tai aiheuttaa kuumenemistä implanttikärjessä.

## 6. Implanttikärjen vaihtamistarpeen arviointi

Kärjen uuteen vaihtamisen tarve arvioidaan sen muodon ja mitan muutoksen perusteella. Kun kärki on lyhentynyt 1 mm teho laskee 25 %, jos lyhentymää on 2 mm teho laskee 50 % jne.

Kärjen uusiminen on suositeltavaa kun kärki on kulunut 1 mm, jotta kärki toimii tehokkaasti.

## Tilausnumerot

Til. nro Y1002606 **Perio Control Kit**  
1 x V-P11R  
1 x V-P11L  
1 x V-P12  
1 x V-P26R  
1 x V-P26L  
1 x V10-adaptteri



Til.nro Z217041 NSK Varios implanttiadapteri V-10 1 kpl  
Til.nro Y900184 NSK Varios Implanttikärki V-P10 3 kpl  
Til.nro Y1002165 NSK Varios Implanttikärki V-P11R 3 kpl  
Til.nro Y1002166 NSK Varios Implanttikärki V-P11L 3 kpl  
Til.nro Y1002167 NSK Varios Implanttikärki V-P12 3 kpl  
Til.nro Y1002168 NSK Varios Implanttikärki V-P26R 3 kpl  
Til.nro Y1002169 NSK Varios Implanttikärki V-P26L 3 kpl



Til.nro Z217399 NSK Varios endo- ja implanttikärkiavain 1 kpl  
- Ei ole momenttisuojattu  
- Käytetään adapterien V10 ja V30 sekä kärkien E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 kiristämiseen.



Til.nro Z221076 NSK Varios momenttiavain teräsuojalla 1 kpl