

3M™ Clinpro™ Clear -fluorikäsittely. Vinkit L-Pop-annospakkauksen käyttöön

Vinkit käyttöön

Koko annospakkaus on turvallista käyttää kerralla



Helppo levittää – paina ja levitä!



Imuletkulle sopiva koostumus

Valitse levitystapa:

Purista aine kuppiin

Taivuta kuppi käteen sopivaksi

Annostele käden selkämykselle



Taivutettava harjapää auttaa saavuttamaan vaikeapääsyiset alueet



Ei sisällä yleisiä allergeeneja*

*Katso allergeenitiedot osoitteessa [3Msuomi.fi/ClinproClear](https://3msuomi.fi/ClinproClear)



Potilas voi syödä tai juoda vain 15 minuutin vähimmäiskontaktiajan jälkeen

Paina kolmiota, annostele kuppiin ja irrota harja – suojusta ei tarvitse poistaa



Fluoraus. Vaivattomammin.

Lue lisää osoitteessa [3Msuomi.fi/ClinproClear](https://3msuomi.fi/ClinproClear)

©Solventum 2024. Solventum ja Clinpro ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M- logo on 3M:n tavaramerkkejä.

Levitä pyyhkäisten – ei ole tarpeen sivellä jokaiseen hammaspintaan