



UltraSeal XT™ plus


HYDROFOBINEN UURRE- JA FISSUURAPINNOITE



UltraSeal XT™ plus™
Inspiral™ Brush -kärki

- Erinomainen retentio²
- Suora annostelu vaikeapääsisille alueille
- Kuplalon, valumaton vienti
- Korkea reunojen retentio estää mikrovuodon
- Tunkeutuu syvimpiin uurteisiin ja fissuuroihin
- Neljä sävyä

UltraSeal XT plus hydrofobinen uurre- ja fissuurapinnoite on valokovetteinen, radiopaakki, fluoridia vapauttava yhdistelmämuovipinnoite. Se on vahvempi ja kulutuskestävämpi, sillä se sisältää 58 % resiniä, ja sen kovettumiskattuminen on vähäisempää kuin kilpailevien tuotteiden. Inspiral Brush -harjan kärjen spiraali saa aikaan filleripitoisen, tiksotrooppisen resiniin ohenemisen, joka alentaa viskositeettia applikoinnin aikana. Resiini jähmettyy, kun pinnoitteen oheneminen päättyy ja applikointi on valmis, mikä estää resiniin valumisen ennen valokovettamista. PrimaDry™-kuivausaineen käyttäminen yhdessä UltraSeal XT plus -pinnoitteen kanssa parantaa tunkeutumista uurteisiin ja fissuuroihin³, sillä se poistaa hydrofobisten pinnoitteiden vaikutusta mahdollisesti heikentävää kosteutta.

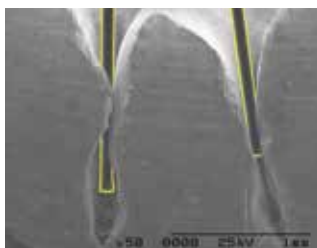

Tiksotrooppinen UltraSeal XT plus -pinnoite ohenee virratessaan Inspiral Brush -kärjen kierteisen kanavan läpi harjan päähän. Se jähmettyy applikoinnin jälkeen.

Ennen ja jälkeen



Ennen.



UltraSeal XT plus -pinnoitteen jälkeen.



Ennen.



UltraSeal XT plus -pinnoitteen jälkeen.

Käyttö



1. Etsä 30 sekuntia preparoimattomassa kiilteessä, 15 sekuntia preparoidussa kiilteessä. Huuhtele.



2. Poista näkyvä kosteus. PrimaDry™-kuivausaine kuivaa.



3. Applikoi PrimaDry-ainetta 5 sekuntia Black Micro™ FX™ -kärjellä ja kuivaa ilmalla.



4. Aseta UltraSeal XT plus -pinnoite.




5. Valokoveta 3 sekuntia VALO™-valokovettajan Xtra Power -tilalla tai 10 sekuntia Standard-teholla.

1. realityesthetics.com 2. Boksman L, Carson B. Two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. *Gen Dent.* 1998;46(2):184-7. 3. Adams TJ, Frazier KB, Browning WD. Effect of drying agent use on sealant penetration [IADR abstract 363]. *J Dent Res.* 2000;79(suppl):189.




Fysikaalisten ominaisuuksien vertailu

SIDOSLUJUUS¹

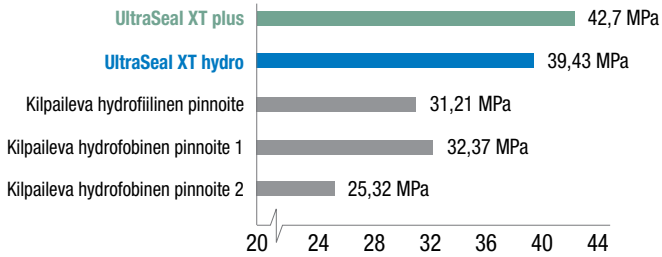


Korkea sidoslujuus on tärkeää pinnoitteen ylläpitämiseksi normaalissa käytössä.

KOVUUS¹

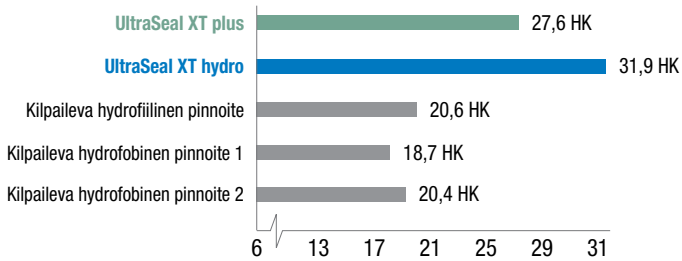

Korkea kovuus merkitsee voimakasta ja kestäväää pinnoitetta, joka ei hajoa eikä kulu.

KUTISTUMINEN¹

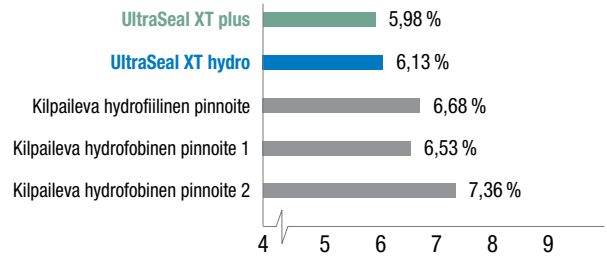

Vähäinen kutistuminen vähentää vaaraa reunoille jäävistä aukoista, jotka voivat johtaa mikrovuotoon.

1. Tiedot arkistossa.

PrimaDry™ KUIVAUSAINE



Black Micro™ FX™ -kärki

PrimaDry™-kuivausaine sopii optimaalisesti uurteen ja fissuurin kuivaukseen ja preparointiin. Se sisältää 99 % orgaanisia liuottimia ja 1 % primeriä. PrimaDry™-kuivausaine haihduttaa nopeasti kosteuden urteesta ja fissuurasta, kun etsausaine on huuhdeltu vesisuihkulla ja uurre tai fissuura kuivattu ilmapuustilla. Ohuen primerikalvon ansiosta UltraSeal XT™ plus -pinnoite virtaa täydellisesti kaikkiin urteisiin ja fissuuroihin. Se on myös hyödyllinen ennen yhdistelmämuovipaikkojen asettamista. Älä käytä dentiinille.

- 725 UltraSeal XT Plus Opaque White -pakkaus
- 563 UltraSeal XT Plus Clear -pakkaus
- 1286 UltraSeal XT Plus Shade A1 -pakkaus
- 733 UltraSeal XT Plus Shade A2 -pakkaus

1 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus -ruisku
1 kpl 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch -ruisku
2 kpl 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry -ruiskuja
20 kpl Blue Micro -kärkiä
20 kpl Inspiral Brush -kärkiä



Säilytetään jääkaapissa.

- 726 UltraSeal XT Plus Opaque White -täyttöpakkaus
- 565 UltraSeal XT Plus Clear -täyttöpakkaus
- 1289 UltraSeal XT Plus Shade A1 -täyttöpakkaus
- 734 UltraSeal XT Plus Shade A2 -täyttöpakkaus

4 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus -ruiskuja



Säilytetään jääkaapissa.

- 727 UltraSeal XT Plus Opaque White -säästötäyttöpakkaus
- 20 kpl 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus -ruiskuja



Säilytetään jääkaapissa.

- 716 PrimaDry-täyttöpakkaus
- 4 kpl 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry -ruiskuja



Säilytetään jääkaapissa.

- 717 PrimaDry-säästötäyttöpakkaus
- 20 kpl 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry -ruiskuja



Säilytetään jääkaapissa.